

# StomFoam Stoma Reinigungsschaum

## Detaillierte Produktbeschreibung

Es entfernt perfekt und sanft Stuhl- und Urinrückstände um das Stoma, bevor das Stomagerät geklebt wird. Eine gute Hautreinigung beugt Dermatitis etc. vor.

### Eigenschaften:

- ist natürlich (ohne Farb- und Konservierungsstoffe)
- Es ist sehr einfach anzuwenden und läuft nicht ab
- hat hervorragende Reinigungseigenschaften
- hat einen neutralen pH-Wert

### Gebrauchen:

Halten Sie Ihre Hände sauber, bevor Sie den Schaum verwenden! Tragen Sie Schaum auf den Bereich um das Stoma auf. Lassen Sie es für eine kurze Zeit wirken. Wischen Sie vorsichtig mit einer feuchten Serviette oder Gaze ab, bis sie sauber sind. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang. Zum Schluss wischen Sie den Bereich um die Haut mit klarem Wasser ab oder duschen und fahren dann mit der üblichen Behandlung fort. Befestigen Sie eine Serviette zum Trocknen.

### Zusammensetzung:

Wasser, Glycereth-8-Ester von Babaseöl, Glycerin, Natriumlaurylsarcosinat, Mandelnatriumamphoacetat, Phenethylalkohol, Ethylhexylglycerin, Polysorbat 80, Parfüm

### Benachrichtigung:

Medizinprodukt. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch! Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen eine der in der Zusammensetzung aufgeführten Substanzen sind. Das Medizinprodukt ist mit allen bekannten Medizinprodukten kompatibel, die von Stomapatienten verwendet werden. Es sind keine Restrisiken oder Nebenwirkungen bekannt.