

Actilite®

Antibacterial dressing with Activon+

Instructions for use

Actilite®

Antibakterielle Wundauflage mit Activon+

Produktbeschreibung

Nicht klebende primäre Wundauflage mit antibakteriellem Activon+ (Manuka Honig & Manukaöl). Sanft zur Haut, durchlässig für Exsudat und ein effektiver Schutz gegen ein breites Spektrum an Bakterien.

Indikation

Kann bei allen Wundarten verwendet werden, u.a. auch bei oberflächlichen Wunden, partiellen und Vollhautdefekten wie Schnitten und Schürfwunden, Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, Operationswunden, Verbrennungen, Hauttransplantaten, Angesteckte Wunden.

Gebrauchsanleitung

Egal mit welcher Seite nach unten direkt auf der Wunde platzieren. Kann zugeschnitten werden. Mit einem sekundären Pflaster oder Verband, je nach Gewebeart im Wundbett und Exsudatmenge, abdecken.

Wie oft sollte man wechseln?

Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell, umliegender Gewebsflüssigkeit oder Ödemen und der Verbandsart kann die Auflage bis zu 7 Tage verbleiben. Bei Verdünnung durch Wundexsudat verringert sich die Wirksamkeit. Für eine stets effektive Honigschicht sollte die Auflage gewechselt werden, sobald sie sich merklich verfärbt. Das Entfernen der Auflage kann durch Befeuchten des Wundbetts mit einer Kochsalzlösung erleichtert werden.

Gegenanzeigen


Nicht bei Allergie gegen Bienengift, Bienenprodukte oder ätherische Öle verwenden. Actilite enthält Glukose – Patienten mit Diabetes müssen ärztlich überwacht werden. Manchmal wird von Schmerzen beim Anbringen berichtet. Je nach Sensitivität der Wunde kann eine angebrachte Dosis Schmerzmittel erwogen werden. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

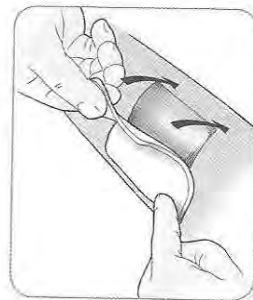

DEU

STERILE R

LATEX

2



CE 0086

Advancis
Medical