

TEARS AGAIN®

Tears Again® Hyaluron-Gel

Augentropfen COMPACT
Mit 3 mg/ml Natriumhyaluronat
Ohne Konservierungsmittel

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat 3 mg/ml, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Calciumchlorid Dihydrat, Natriumhydrogencarbonat, Aqua purificata

Indikation und klinischer Nutzen

Zur intensiven Befeuchtung der Augenoberfläche bei trockenen, müden, gereizten, überanstrengten oder brennenden Augen aufgrund des trockenen Augen Syndroms und Umweltfaktoren (z.B. Medikamente, Umweltverschmutzung, Computernutzung, Klimaanlage, Allergie, Benetzung von Kontaktlinsen während des Tragens) sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

Tears Again® Hyaluron-Gel macht das Tragen von Kontaktlinsen angenehmer.

Leistungsmerkmale

Konservierungsmittelfreie wässrige Lösung auf Basis von Hyaluronsäure und Elektrolyten versorgt das Auge mit Feuchtigkeit.

Anwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch Originalitätsverschluss entfernen (Abb. 1).
2. Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen und nach der Anwendung wieder aufsetzen (Abb. 2). Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Tropferspitze.
3. Den Kopf etwas nach hinten neigen und die Flasche mit der Tropferöffnung senkrecht nach unten über das Auge halten (Abb. 3).
4. Das Auge vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger öffnen oder das Unterlid leicht nach unten ziehen (Abb. 4).
5. Durch leichtes Drücken auf die Mitte der Flasche werden 1-2 Tropfen auf die Augenoberfläche oder in den Bindehautsack eingebracht (Abb. 4).



Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 4-mal tägliche Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden kann Tears Again® Hyaluron-Gel bedenkenlos häufiger angewendet werden.

Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich.

Tears Again® Hyaluron-Gel kann während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

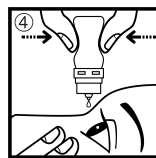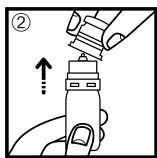

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten eingehalten werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos abklingen.

Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Hinweise

Unmittelbar nach der Anwendung kann die Sehschärfe kurzfristig beeinträchtigt sein.

Für Erwachsene und Kinder.

Kinder sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

In sehr seltenen Fällen wurde von Hornhautkalkifizierungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Augentropfen mit erhöhter Phosphatkonzentration bei Patienten mit erheblich beschädigter Hornhaut berichtet. Tears Again® Hyaluron-Gel Augentropfen enthalten lediglich die physiologische Phosphatkonzentration, so dass Ihre Anwendbarkeit auch bei bestehenden stärkeren Hornhautstörungen/-schädigungen grundsätzlich nicht eingeschränkt ist. Sofern zusätzlich weitere Augentropfen-Präparate angewendet werden, sollte in diesem Zusammenhang aber auf deren Phosphatgehalt geachtet werden, da insbesondere bei Antiglaukomatosa oder Antiallergika erhöhte Phosphatkonzentrationen enthalten sein können.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung

Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur, nicht einfrieren.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.

Stand der Information: 2022-09

Importeur/Vertrieb

Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstr. 49
85399 Hallbergmoos, Deutschland
www.optimapharma.de



Optima Medical Swiss AG
Bundesstr. 7
6300 Zug, Schweiz



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
39100 Bolzano (BZ),
Italien

CE 0482

Hersteller

STERILE A

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Nach Anbruch 6 Monate verwendbar

Verfalldatum
(JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Gebrauchsanweisung beachten



Medizinprodukt

Chargen-Nummer



Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft