



# COMPRESSANA CALYPSO 40

ca. 10 mmHg

Stützklasse | soft

40 den

Transparente Strumpfhosen und Strümpfe mit der Optik von Feinstrümpfen in hochwertigster Verarbeitung. Aufwändige Strick- und Nähetechnik. Mit leichter, angenehmer Stützwirkung. Wohltuend – den ganzen Tag.

- **Strumpfhose mit modisch unverstärktem Höschen**
- **halterlose Strümpfe mit Spitzenband**
- **hauchzarte Transparenz bis in die Fußspitze**
- **seidiger Glanz**



Produkt	Größe	Farbe
Strumpfhose „tutto nudo“ transparentes Höschen	<b>I-VI</b> XS-XXL	cafécreme   schwarz
„Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	<b>II-V</b> S-XL	cafécreme   schwarz
Kniestrümpfe mit Massage-Fußsohle	<b>II-IV</b> S/M, M/L, XL	cafécreme   schwarz

**TIPP**  
Fußkomfort

## Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

- **Vor dem Tragen waschen • auf links waschen**
- **keine Weichspüler verwenden**

## Größenübersicht Calypso 40

Gr.	Konfektion	Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp	
<b>I</b>	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
<b>II</b>	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
<b>III</b>	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
<b>IV</b>	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
<b>V</b>	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
<b>VI</b>	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

