


# Technisches Datenblatt

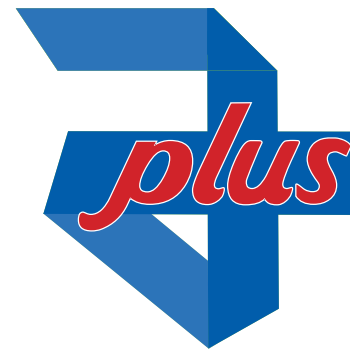

## MaiMed® MyClean DS Schnelldesinfektion

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (behüllte Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Aldehydfrei und parfümfrei
- Frei von Tierversuchen und vegan
- VAH-gelistet



### Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen, patientennahem Umfeld und im Lebensmittelbereich (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.


### Ausführungen:

#### MaiMed® MyClean DS – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion	Neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18 Flaschen
Schnelldesinfektion	Neutral	1 l	79610	4046153116102	10305723	12 Flaschen
Schnelldesinfektion	Neutral	5 l	79611	4046153116126	10305746	2 Kanister
Schnelldesinfektion	Neutral	10 l	79612	4046153116140	10305752	1 Kanister

### Wirksamkeiten gem. EN-Normen und Richtlinien der VAH:

Bakterizid, levurozid (EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC (inkl. M.-terrae) (EN 13624, EN 13727, VAH; hohe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	15 Minuten
Noro-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	5 Minuten
Rota-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	30 Sekunden
Vaccinia Elstree/BVDV (DVV/RKI) (10 % FKS):	30 Sekunden
SV40-Viren (DVV/RKI; geringe Belastung):	5 Minuten

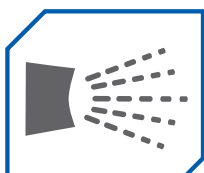

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1–7  
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean-DS-Schnelldesinfektion-202009

# Technisches Datenblatt



## MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS

Schnelldesinfektion

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43 g Ethanol,  
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**eClass:** **30-30-01-02**

**Biozid-Nr.:** N-63770, N-63771

**Verwendbarkeit:**  3 Jahre


**Halbbarkeit nach Anbruch:**  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

**Symbole:**

 Medizinprodukt/  
Medical Device  
0482   
UN 1170



Achtung

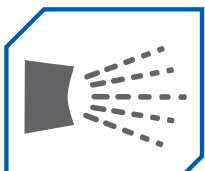

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean-DS-Schnelldesinfektion-202009