

Kniewärmer Gelenkwärmer mit zusätzlicher Stütz- / Bandagenfunktion thermische Angora

Findet Verwendung bei:

- Arthrose
- Gelenk- und Muskelschmerzen
- Bei Wintersportaktivitäten
- Typische Pathologien des dritten Alters

Beschreibung:

Der Kniewärmer haftet perfekt am Körper.
Er schenkt sofortigen Komfort und Wohlbefinden
Hergestellt aus dem Fell des Angorakaninchens, extrem weich und dünn.
Der Faden im Inneren hat eine hohe Leistung, um Wärme zu speichern.
Extrem fein und mit abgerundeter Spitze brennt es nicht und verursacht nicht den lästigen Effekt, der als „Wollallergie“ bezeichnet wird.
Er bietet eine wärmende Wirkung
Er ermöglicht eine volle Bewegungsfreiheit
Er rollt sich nicht auf und verrutscht nicht

Warnhinweise:

Achtung - das Medizinprodukt ist nicht steril. Nicht mit verletzter Haut in Kontakt bringen.
Verwenden Sie keine Salben oder Lotionen in direktem Kontakt mit der Bandage.
Verändern Sie den Aufbau der Bandage nicht, um seine Funktionalität zu verändern.
Die für die Herstellung der Bandage verwendeten Materialien, schließen in der Regel der uns bekannten Fälle, das Auftreten von Nebenwirkungen, aus.
Sollten Nebenwirkungen auftreten, verwenden Sie die Bandage nicht mehr und wenden Sie sich an das medizinische Personal.

Waschanleitung:

Handwäsche bei 30° mit Neutralseife oder Waschmittel - gründlich ausspülen - nicht auswringen, sondern das Kleidungsstück in einem Handtuch tupfen - leicht bügeln - nicht bleichen - nicht chemisch reinigen - liegend trocknen.

Techn. Daten:

Material: 32% Angora, 61% Polyamid, 7% Elastan
Farbe: beige /haut
Herstellung: EU

CE

Med.-Produkt: Klasse 1

Ausf.	Artikel-Nr.	Menge	Größe	Maße/Umfang	EAN	PZN
	71254/1	1 St.	S	32 – 36 cm	4017685712544	19390825
	71255/1	1 St.	M	37 – 41 cm	4017685712551	19390848
	71256/1	1 St.	L	42 – 47 cm	4017685712568	19390860
	71254/2	2 St.	S	32 – 36 cm	4017685812541	19390831
	71255/2	2 St.	M	37 – 41 cm	4017685812558	19390854
	71256/2	2 St.	L	42 – 47 cm	4017685812565	19390877

Fon + Fax: +49-(0)7127-35425, eMail: grossgmbh@mthmed.de, www.mthmed.com