

# McMed® Augentropfen

mit Natriumhyaluronat 0,15 %

MEDIZINPRODUKT

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**McMed® Augentropfen** sind ein steriles konservierungsmittelfreies Produkt und bilden einen viskoelastischen, klaren Schutzfilm auf der Hornhaut. **McMed® Augentropfen** enthalten Natriumhyaluronat, das Natriumsalz der Hyaluronsäure, das aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaft einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Schutzfilm auf der Hornhaut bildet, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Dadurch bewirken sie lang anhaltende Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit:

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.



Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind Augentropfen auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. Augentropfen sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden.

## Dosierungsanleitung und Anwendung:

**1.** Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. **2.** Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen).

**3.** Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3-5mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges.

Schließen Sie langsam das Auge, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie ihren Augenarzt auf.

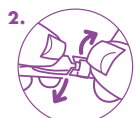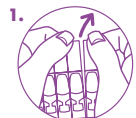

## Zusammensetzung:

1 ml enthält: Natriumhyaluronat 0,15 %, Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

## Packungsgröße:

Ein-Dosis-Behältnisse, 15 x 0,35 ml (5,25 ml)

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **McMed® Augentropfen** keine Konservierungsmittel enthalten, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **McMed® Augentropfen** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel eingeprägt.
- **McMed® Augentropfen** enthalten Phosphatpuffer. Bei längerfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von **McMed® Augentropfen** zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.
- **Lagerung:** Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

### Sonstige Hinweise:



Lagerungstemperatur



aseptische Herstellung



Chargennummer und "verwendbar bis" sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt.



nur zum Einmalgebrauch



Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis



Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.



### Hersteller:

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln

Distributor:  
Dr. Kleine Pharma GmbH  
Heidsieker Heide 114  
D-33739 Bielefeld

# CE 0483

Stand der Information: 03.2017

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.