

Liebe Eltern!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauch des NYDA® Läuse- und Nissenkamms

### Was gesucht wird:



**Läuse:** grau bis bräunlich, groß wie ein Sesamkorn



**Larven:** kleine, gerade geschlüpfte Läuse



**Nissen:** weiß bis bräunlich, sandkorngröße, ovale Eier der Laus.  
Im Unterschied zu Schuppen kleben sie fest am Haar.

### Diagnose:

Das gesamte Kopfhaar eines jeden Familienmitgliedes sollte entsprechend der Anwendungshinweise auf der Rückseite mit dem NYDA® Läuse- und Nissenkamm auf lebende Läuse und Larven untersucht werden.

### Behandlung:

Festgestellter Kopflausbefall sollte unbedingt mit einem effektiven Kopflausmittel, z. B. NYDA® gegen Läuse und Nissen, therapiert werden. NYDA® ist hochwirksam und sehr gut verträglich. Bereits nach der ersten Einwirkzeit des NYDA® Kopflausmittels können die toten Läuse und Larven mit Hilfe des Läusekamms ausgekämmt werden.

### Kurzinformation zum Kopflauspräparat NYDA®

Bei NYDA® handelt es sich um ein Produkt auf Dimeticonbasis.

NYDA® wird angewendet zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Befall mit Kopfläusen (Pediculosis capitis).

NYDA® dringt schnell in alle Verzweigungen des Atemsystems der Läuse und Larven sowie in die Eier ein und verdrängt dort den Sauerstoff. Dies führt zu deren Erstickung.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von NYDA® werden nicht nur die erwachsenen Läuse, sondern auch die Jugendstadien (Larven) und die Eier (Nissen) der Kopfläuse abgetötet.

Sie erhalten NYDA® in der Apotheke. Weitere Informationen finden sie unter [www.nyda.de](http://www.nyda.de)

### Anwendung des NYDA® Läuse- und Nissenkamms:



① Das Haar sorgfältig bürsten und mögliche Knoten lösen.



② Dann die Haare immer wieder scheiteln und Strähnen bilden.



③ Wichtig: Den Kamm so in die Hand nehmen, dass der abgewinkelte Handgriff vom Kopf weg zeigt. So können die Läuse und Nissen optimal ausgekämmt werden.



④ An der Kopfhaut beginnen und Strähne für Strähne den Kamm langsam zu den Spitzen ziehen.



⑤ Nach jedem Durchkämmen den Kamm auf Läuse oder Nissen kontrollieren und sorgfältig mit einem Papiertuch reinigen.

Hinweis: Im Haar verbleibende Nissen sind nach der kompletten Behandlung mit dem Kopflausmittel NYDA® meist abgetötet und nicht mehr ansteckend.

G. Pohl-Boskamp  
GmbH & Co. KG  
Kieler Straße 11  
25551 Hohenlockstedt  
Telefon: 0 48 26 / 59-0  
Telefax: 0 48 26 / 59-109

Hersteller:  
KSL Consulting  
Ramløsevej 25  
DK - 3200 Helsingør  
Dänemark

**POHL BOSKAMP** 



227850001-1

Format: 138 x 168 mm

Art.-Nr.: 227850001-1  
Laetus-Code: ----  
Korrekturabzug: 03  
Bearbeiter: H.Brockmann  
Datum: 04.06.09

 Black

 kontur

POHL BOSKAMP

