



## Zum Gebrauch durch alle Paare die ein Kind zeugen möchten

- ✓ **Klinisch getestet  
Fruchtbarkeitsfreundlich**
- ✓ **Unterstützt die Lebensfähigkeit  
der Spermazellen**
- ✓ **Vermittelt zusätzliche Feuchtigkeit**
- ✓ **Einfach zu bedienende Applikatoren**
- ✓ **Patentierter Formel**

Conceive Plus ist isotonisch und besitzt optimale pH-Werte, um Zervixschleim nachzuahmen.

### **Enthält Kalzium- und Magnesiumionen zur Unterstützung des Fertilitäts- und Empfängnisprozess.**

Der Gebrauch von Conceive Plus kann dazu beitragen, die Chancen auf eine natürliche Empfängnis zu erhöhen.

**INDIKATIONEN:** Conceive Plus ist ein persönliches Gleitmittel für Penis- bzw. Vaginalanwendung. Es erhöht die Feuchtigkeit und Gleitfähigkeit der Haut, sodass die intime sexuelle Aktivität sich einfacher und angenehmer gestaltet. Es ergänzt die körpereigene Feuchtigkeitsbildung. Conceive Plus ist mit Spermien, Eizellen und Embryonen verträglich und kann von Paaren mit Kindeswunsch durch direktes Auftragen auf die Genitalien angewendet werden. Conceive Plus ist mit Naturkautschuklatex und Polyurethankondomen verträglich. Dieses Produkt kann bei Fertilitätseingriffen verwendet werden, um das Einführen von medizintechnischen Produkten (Diagnose und Therapie) in das Scheidengewölbe zu erleichtern.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:** Applikator aus der Verpackung nehmen; nicht verwenden, wenn der Sicherheitsverschluss defekt ist. Halten Sie den Applikator mit dem schmalen Ende nach oben, drehen Sie den Verschluss ab und werfen Sie ihn weg. Führen Sie vorsichtig das schmale Ende des Applikators tief in die Vagina ein und drücken Sie 2-3 mal auf das breite Ende, um Conceive Plus im Scheidengewölbe abzulagern. Ziehen Sie den Applikator zurück, wobei Sie weiterhin auf das breite Ende drücken, und entsorgen Sie ihn dann. Kann bis zu 15 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr angewendet werden, um dem Gleitmittel zu ermöglichen, Vagina und Gebärmutterhals zu überziehen. Für zusätzliche Feuchtigkeit tragen Sie noch etwas Gleitmittel aus der Tube auf oder verwenden einen anderen Applikator.

**BESTANDTEILE:** Wasser, Hypromellose, Natriumphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Kalziumchlorid, Glycerin, Methylparaben.

Klinische Studien zeigen

**99%**

Lebensfähige Spermien

nach 2 Stunden

Einwirkung durch

**Conceive Plus.\***

Hindernis hervorgerufen  
durch manche Gleitmittel.



Conceive Plus hilft,  
eine optimale Umgebung für  
Spermien zu schaffen.



+



Wir empfehlen den Gebrauch von  
multi-use tube Conceive Plus

**KLINISCHER GEBRAUCH:** Conceive Plus kann auch verwendet werden, um Vaginalgewebe gleitfähig zu machen zwecks Erleichterung des Einführens medizintechnischer Produkte in das Scheidengewölbe (Diagnose und Therapie). Dieses Produkt ist nicht steril und sollte nicht verwendet werden, wenn ein steriles Produkt erforderlich ist. Gewünschte Menge auf Instrument bzw. Genitalbereich vor Einführen auftragen.

**WARNUNGEN:** Jeder Applikator ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nach dem Öffnen nicht aufbewahrt oder wiederverwendet werden. Kein Empfängnisverhütungsmittel; Conceive Plus tötet weder Spermien ab noch beeinträchtigt es die Spermienfunktion. Nicht verwenden, wenn der Sicherheitsverschluss beschädigt ist oder fehlt. Wenn Hautirritationen auftreten, beenden Sie den Gebrauch und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome anhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Conceive Plus ist sehr glitschig, Verschüttungen sofort säubern. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nach 6-monatiger Anwendung dieses Produkts nicht schwanger geworden sind. Dieses Produkt ist nicht für Heiminsamationsverfahren konzipiert. Lagerung zwischen 2° C - 30° C in dieser Verpackung.

Lesen Sie immer das Etikett, nur wie vorgeschrieben verwenden.

\*Eine veröffentlichte Studie zeigt Spermisicherheit,  
Daten auf [conceiveplus.com](http://conceiveplus.com)