

earclin®

FÜR KINDER!

Ohrdusche

1. WARUM MÜSSEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?
2. WAS IST DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER?
3. WIE VERWENDEN SIE DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER
4. KANN DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER VERWENDET WERDEN, WENN DAS KIND EIN HÖRGERÄT TRÄGT?
5. GIBT ES RISIKEN BEI DER ANWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER?
6. WARUM IST VERWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER SICHER?
7. INHALT
8. KONTAKTINFORMATIONEN

1. WARUM MÜSSEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?
Ohrschmalz, oder Cerumen, ist ein Selbstreinigungsmittel, das Ihr Körper produziert. Darin sammeln sich Schmutz, Bakterien und andere Verunreinigungen. In der Regel wird das Ohrschmalz durch Kaos und andere Bewegungen des Kiefers auf natürliche Weise aus den Ohren gelöst.
Ohrschmalz kann sich ansammeln und Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Wenn sich zu viel Ohrschmalz ansammelt, nennt man das eine Impaktion. Eine Impaktion kann folgende Symptome verursachen:

- Schmerzen im betroffenen Ohr
- Ein eingeengtes Gefühl oder Klingeln im Ohr
- Eingeschränktes Hörvermögen am betroffenen Ohr
- Ein unangenehmer Geruch aus dem betroffenen Ohr
- Schwindelgefühl
- Husten

Wenn Sie Hörgeräte, Ohrstöpsel oder In-Ear-Kopfhörer benutzen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie überschüssiges Ohrschmalz entwickeln. Bei älteren Personen und Menschen mit Entwicklungsstörungen besteht ein höheres Risiko, überschüssiges Ohrschmalz zu entwickeln. Die Form Ihres Gehörgangs kann die natürliche Entfernung von Ohrschmalz erschweren.

2. WAS IST DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER?
Die earCin Ohrdusche basiert auf der gleichen Technik, die auch von Ohrärzten verwendet wird. Die earCin Ohrdusche enthält eine einzigartige Seife, die überschüssiges Ohrschmalz einfach ausspült. Sie spült Ihren Gehörgang sanft mit Wasser aus, das mit der einzigartigen earCin Seifenlösung angereichert ist. Eine einfache Methode zur Reinigung der Ohren Die earCin Ohrdusche ist eine wirksame Lösung zur regelmäßigen Reinigung der Gehörgänge, die Sie bequem und einfach zu Hause anwenden können. Wie das Zähneputzen sollte dies ein Teil Ihrer persönlichen Gesundheits- und Hygienerroutine sein. Verwenden Sie die Seifenlösung in der earCin Ohrdusche, um überschüssiges Ohrschmalz einfach auszuspülen.

Die EarCin Ohrdusche für Kinder ist besonders geeignet für:

- Kinder mit regelmäßigem Wasserkontakt
- Kinder mit einer hohen Ohrschmalzproduktion
- Kinder, die Hörgeräte, Ohrschützer oder In-Ear-Kopfhörer tragen
- Kinder, die regelmäßig Staub oder Schmutz ausgesetzt sind

3. WIE VERWENDE ICH DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER?
Verwenden Sie die earCin Ohrdusche regelmäßig (2-3 Mal pro Woche), um den äußeren Gehörgang sauber zu halten. Bei einer übermäßigen Produktion von Ohrschmalz (Cerumen) verwenden Sie die earCin Ohrdusche jeden Tag über einen Zeitraum von 2 aufeinanderfolgenden Wochen. Verwenden Sie die earCin Ohrdusche nach der ersten Anwendung maximal 30 Tage lang.

Die earCin Ohrdusche für Kinder ist geeignet für:

- Kinder, wenn die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgt
- Kinder mit Hörgeräten
- Kinder, die ihren äußeren Gehörgang sauber halten wollen
- Kinder (ab 3 Jahren), wenn die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgt

Die übliche Dusch- oder Badroutine ist der beste Moment für die Anwendung der earCin Ohrdusche. Erstmalige Anwendung: Spülen Sie die earCin Ohrdusche 2 Mal mit klarem Wasser aus, saugen Sie danach lauwarmes Wasser (max. 40 °C) in das Gerät, spülen Sie das Ohr aus und trocknen Sie es anschließend. Wie bei der professionellen Reinigungsmethode, die von Fachärzten verwendet wird, reinigt die earCin Ohrdusche die Ohren mit natürlichem, lauwarmem Wasser. Der Seifenstoff (medizinische Seife) im Inneren des Röhrchens erleichtert nicht nur den Reinigungsprozess, sondern zeigt auch an, wie lange die earCin Ohrdusche verwendet werden kann.

Wie verwende ich earCin Ohrdusche für Kinder?
Saugbühne: Verwenden Sie die Saugbühne um lauwarmes Wasser (max. 40 °C) in die earCin Ohrdusche zu saugen und es dann sanft in den Gehörgang zu geben. Verwenden Sie danach die leere earCin Ohrdusche, um Luft in den Gehörgang zu blasen und die restliche Feuchtigkeit zu entfernen. Drücken Sie die Ohrdusche einmal zusammen, um sie mit lauwarmem Wasser zu füllen. Spülen Sie jedes Ohr pro Anwendung 3 Mal aus. Die Saugbühne braucht in der Zwischenzeit nicht nachgefüllt zu werden.

Sprühkopf: Setzen Sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs an. Seine Form und Größe verhindert, dass Sie die earCin Ohrdusche versehentlich zu weit in Ihr Ohr schieben.

Sanfte und wirksame Seife: Die in der earCin Ohrdusche enthaltenen Inhaltsstoffe ergeben in Verbindung mit lauwarmem Wasser eine einzigartige Seifenlösung.

4. KANN DIE EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER AUCH VON KINDERN VERWENDET WERDEN, DIE EIN HÖRGERÄT TRAGEN?
Die earCin Ohrdusche ist besonders für Träger von Hörgeräten geeignet, da die regelmäßige Anwendung (jeden Tag vor dem Schlafengehen) eine perfekte Hygiene des Gehörgangs ermöglicht, die für eine einwandfreie Funktion des Hörgeräts unerlässlich ist.

5. GIBT ES RISIKEN BEI DER ANWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER?
Die earCin Ohrdusche ist besonders verträglich und wurde speziell für Personen ab 3 Jahren entwickelt. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern. Kleine Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar - bewahren Sie die Ohrdusche deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Brechen Sie die Verwendung der earCin Ohrdusche ab, wenn es zu einer allergischen Reaktion kommt. Nicht verwenden, wenn Sie gegen eine oder mehrere der Inhaltsstoffe allergisch sind.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht ohne ärztliches Einverständnis bei Mittelohrentzündungen, Schmerzen im Ohr, einem perforierten Trommelfell und generell bei Personen, die zu Schwindelgefühlen neigen oder bei denen eine medizinische Vorgesichte in Bezug auf das Ohr oder Trommelfell besteht. Möglicherweise besteht eine Ohrschmalz-Impaktion, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind, und es ist möglich, dass diese Impaktion unter der Anwendung der earCin Ohrdusche anschwillt und Unbehagen verursacht. In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die earCin Ohrdusche darf nicht angewendet werden

- Bei Personen mit bestehenden Beschädigungen (z. B. Perforation) oder Verformungen des Trommelfells
- Bei Personen mit geschädigtem Gehörgang
- Bei Kindern unter 3 Jahren

⚠ Wenn Ihre Gehörgänge verstopft sind, empfehlen wir Ihnen, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Nachdem die Ohren von einem Spezialisten professionell gereinigt wurden, empfehlen wir, sie regelmäßig mit der earCin Ohrdusche zu spülen, um weitere Ohrschmalzablagerungen zu verhindern.

6. WARUM IST EARCLIN OHRDUSCHE FÜR KINDER SICHER IN DER ANWENDUNG?
Die earCin Ohrdusche spült Ohrschmalz gründlich aus, ohne dass ein mechanischer Eingriff erforderlich ist. Die abgerundete Form der Ohrdusche sorgt für ein angenehmes Gefühl am Ohr des Benutzers. Die Größe verhindert, dass das Gerät zu weit in den Gehörgang eindringt, sodass Verletzungen, insbesondere des Trommelfells, praktisch unmöglich sind. Gleichzeitig fungiert die Ohrdusche als Sprühkopf. Das patentierte Design sorgt dafür, dass die Spüllösung optimal im Gehörgang verteilt wird. Die olivenförmige Ohrdusche verbleibt außerdem über einen Mechanismus zum Schutz vor übermäßigem Druck. Halten Sie Ihre earCin Ohrdusche beim Dusch- oder Baden in Reichweite.

7. INHALT

- 1 earCin Ohrdusche • Gebrauchsanweisung

INHALTSSTOFFE: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL, SUCROSE, PEG-4001, TETRASODIUM.


ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und sich und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller		Symbol für die eindeutige Produktkennung
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren		Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist		Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Produktionsdatum		Symbol für die Chargennummer
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss		Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

8. KONTAKT

Hersteller / TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115
11076 EE Amsterdam
Niederlande
www.theotclab.com

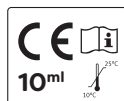

DAS GLÜCKLICHE NILPFERD!

Einzigartige Seifenlösung