

earClin®

Ohrdusche

1. WARUM MÜSSEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?
2. WAS IST DIE EARCLIN OHRDUSCHE?
3. WIE VERWENDE SIE DIE EARCLIN OHRDUSCHE?
4. KANN DIE EARCLIN OHRDUSCHE AUCH VON PERSONEN MIT EINEM HÖRGERÄT VERWENDET WERDEN?
5. GIBT ES RISIKEN BEI DER VERWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE?
6. WARUM IST DIE VERWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE SICHER?
7. INHALT
8. KONTAKTINFORMATIONEN

1. WARUM MÜSSEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?

Ohrschmalz, oder Cerumen, ist ein Selbstreinigungsmittel, das Ihr Körper produziert. Darin sammeln sich Schmutz, Bakterien und andere Verunreinigungen. In der Regel wird das Ohrschmalz durch Kauen und andere Bewegungen des Kiefers auf natürliche Weise aus den Ohren gelöst. Ohrschmalz kann sich ansammeln und Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Wenn sich zu viel Ohrschmalz ansammelt, nennt man das eine Impaktion. Eine Impaktion kann folgende Symptome verursachen:

- Schmerzen im betroffenen Ohr
- Ein eingeeengtes Gefühl oder Klingeln im Ohr
- Eingeschränktes Hörvermögen am betroffenen Ohr
- Ein unangenehmer Geruch aus dem betroffenen Ohr
- Schwindelgefühl
- Husten

Wenn Sie Hörgeräte, Ohrstöpsel oder In-Ear-Kopfhörer benutzen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie überschüssiges Ohrschmalz entwickeln. Ältere Personen haben ein größeres Risiko, überschüssiges Ohrschmalz zu entwickeln. Die Form Ihres Gehörgangs kann die natürliche Entfernung von Ohrschmalz erschweren.

2. WAS IST DIE EARCLIN OHRDUSCHE?

Die earClin Ohrdusche basiert auf der gleichen Technik, die auch von Otorinolaryngologen verwendet wird. Die earClin Ohrdusche enthält eine einzigartige Seife, die überschüssiges Ohrschmalz einfach ausspült. Sie spült Ihren Gehörgang sanft mit Wasser aus, das mit der einzigartigen earClin Seifenlösung angereichert ist. Eine einfache Methode zur Reinigung der Ohren Die earClin Ohrdusche ist eine wirksame Lösung zur regelmäßigen Reinigung des Gehörgangs, die Sie bequem und einfach zu Hause anwenden können. Verwenden Sie die Seifenlösung in der earClin Ohrdusche, um überschüssiges Ohrschmalz einfach auszuspülen.

Die earClin Ohrdusche ist besonders geeignet für:

- Sportler mit regelmäßigem Wasserkontakt
- Personen mit einer hohen Ohrschmalzproduktion
- Personen, die Hörgeräte, Ohrschützer oder In-Ear-Kopfhörer tragen
- Personen, die regelmäßig Staub oder Schmutz ausgesetzt sind

3. WIE VERWENDE ICH DIE EARCLIN OHRDUSCHE?

Verwenden Sie die earClin Ohrdusche regelmäßig (2-3 Mal pro Woche), um den äußeren Gehörgang sauber zu halten. Bei einer übermäßigen Produktion von Ohrschmalz (Cerumen) verwenden Sie die earClin Ohrdusche jeden Tag über einen Zeitraum von 2 einanderfolgenden Wochen. Verwenden Sie die earClin Ohrdusche nach der ersten Anwendung maximal 30 Tage lang.

Die earClin Ohrdusche ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Zur Selbstanwendung bei Erwachsenen
- Personen mit Hörgeräten
- Personen, die ihren äußeren Gehörgang sauber halten wollen
- Kinder (ab 3 Jahren), wenn die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgt

Die übliche Dusch- oder Badroutine ist der beste Moment für die Anwendung der earClin Ohrdusche. Erstmalige Anwendung: Spülen Sie die earClin Ohrdusche 2 Mal mit klarem Wasser aus, saugen Sie danach lauwarmes Wasser (max. 40 °C) in das Gerät, spülen Sie das Ohr aus und trocknen Sie es anschließend. Wie bei der professionellen Reinigungsmethode, die von Fachärzten verwendet wird, reinigt die earClin Ohrdusche die Ohren mit natürlichem, lauwarmem Wasser. Der Seifenstab (medizinische Seife) im Inneren des Röhrchens erleichtert nicht nur den Reinigungsprozess, sondern zeigt auch an, wie lange die earClin Ohrdusche verwendet werden kann.

Wie verwende ich earClin Ohrdusche?

Saugbirne: Verwenden Sie die Saugbirne, um lauwarmes Wasser (max. 40 °C) in die earClin Ohrdusche zu saugen und es dann sanft in den Gehörgang zu geben. Verwenden Sie danach die leere earClin Ohrdusche, um Luft in den Gehörgang zu blasen und die restliche Feuchtigkeit zu entfernen. Drücken Sie die Ohrdusche einmal zusammen, um sie mit lauwarmem Wasser zu füllen. Spülen Sie jedes Ohr pro Anwendung 3 Mal aus. Die Saugbirne braucht in der Zwischenzeit nicht nachgefüllt zu werden.

Sprühkopf: Setzen Sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs an. Seine Form und Größe verhindert, dass Sie die earClin Ohrdusche versehentlich zu weit in Ihr Ohr schieben.

Sanfte und wirksame Seife: Die in der earClin Ohrdusche enthaltenen Inhaltsstoffe ergeben in Verbindung mit lauwarmem Wasser eine einzigartige Seifenlösung.

4. KANN DIE EARCLIN OHRDUSCHE AUCH VON PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE EIN HÖRGERÄT TRAGEN?

Die earClin Ohrdusche ist besonders für Träger von Hörgeräten geeignet, da die regelmäßige Anwendung (jeden Tag vor dem Schlafengehen) eine perfekte Hygiene des Gehörgangs ermöglicht, die für eine einwandfreie Funktion des Hörgeräts unerlässlich ist.

5. GIBT ES RISIKEN BEI DER ANWENDUNG DER EARCLIN OHRDUSCHE?

Die earClin Ohrdusche ist besonders verträglich und wurde speziell für Personen ab 3 Jahren entwickelt. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern. Kleine Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar - bewahren Sie die Ohrdusche deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Brechen Sie die Verwendung

der earClin Ohrdusche ab, wenn es zu einer allergischen Reaktion kommt. Nicht verwenden, wenn Sie gegen eine oder mehrere der Inhaltsstoffe allergisch sind.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht ohne ärztliches Einverständnis bei Mittelohrentzündungen, Schmerzen im Ohr, einem perforierten Trommelfell und generell bei Personen, die zu Schwindelgefühlen neigen oder bei denen eine medizinische Vorgeschichte in Bezug auf das Ohr oder das Trommelfell vorliegt. Möglicherweise haben Sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, eine Ohrschmalz-Impaktion und es ist möglich, dass diese Impaktion unter der Einwirkung der earClin Ohrdusche anschwellt und Unbehagen verursacht. In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die earClin Ohrdusche darf nicht angewendet werden

- Bei Personen mit bestehenden Beschädigungen (z. B. Perforation) oder Verformungen des Trommelfells
- Bei Personen mit geschädigtem Gehörgang
- Bei Kindern unter 3 Jahren

⚠ Wenn Ihre Gehörgänge verstopft sind, empfehlen wir Ihnen, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Nachdem die Ohren von einem Spezialisten professionell gereinigt wurden, empfehlen wir, sie regelmäßig mit der earClin Ohrdusche zu spülen, um weitere Ohrschmalzablagerungen zu verhindern.

6. WARUM IST DIE EARCLIN OHRDUSCHE SICHER IN DER ANWENDUNG?

EarClin earshower thoroughly flushes out the cerumen without any mechanical intervention. The rounded shape of the ear piece makes it feel pleasant against the user's ear. The dimensions prevent it from entering too far into the ear canal, making injuries virtually impossible, especially to the eardrum. At the same time, the ear piece acts as a spray head. Its patented design ensures that the flushing solution is optimally dispersed within the ear canal. The olive-shaped ear piece also features a mechanism to protect against excessive pressure. Keep your earClin earshower within easy reach when taking a shower or bath.



7. INHALT

- 1 earClin Ohrdusche • Gebrauchsanweisung

INHALTSSTOFFE: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL, SUCROSE, PEG-4001, TETRASODIUM.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert.

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller		Symbol für die eindeutige Produkterkennung
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren		Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist		Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Produktionsdatum		Symbol für die Chargennummer
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss		Symbol, das anzeigt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

8. KONTAKT

🏠 Lieferant / Hersteller
TheoCLab
Fred. Roeskestraat 115
11076 EE Amsterdam
Niederlande
www.theoclub.com



Einzigartige Seifenlösung

