

Eclipse®

Super absorbent dressing

Instructions for use

Advancis
M e d i c a l

Eclipse®

Super saugfähige Wundauflage

DEU

Produktbeschreibung

Eclipse wurde für nässende Wunden entwickelt. Die Auflage besteht aus einem Gewebe aus Polyester und Viskose für schnellen Dochteffekt und einer Schicht hochsaugfähiger Kristalle in einer mechanischen Zelloseverbindung. Die beige Schutzschicht aus atmungsaktivem Polyethylen verhindert ein Durchnässen.

Indikation

Mittel bis stark nässende Wunden; Unterschenkelgeschwüre, Wunden mit Gewebemarkierung / belegte Wunden, postoperative oder klaffende Wunden, exulzierende Wunden, Transplantationswunden.

Gegenanzeigen

Arterienblutungen und stark blutende Wunden.

Gebrauchsanleitung



Eclipse wird mit der weißen Seite nach unten und der beige Schutzschicht nach oben auf die Wundoberfläche aufgelegt. Bei größeren Wunden mehrere Auflagen nebeneinander platzieren. Brüchige Haut oder trockenere Stellen der Wunde mit einer nicht klebenden Auflage unter der Eclipse-Auflage schützen. Mit Pflaster oder einer Bandage gut fixieren. Eclipse kann auch unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

Wie oft sollte man wechseln?

Die Tragezeit hängt von der Exsudatmenge ab. Täglicher Wechsel kann angezeigt sein, Eclipse kann aber bis zu 7 Tage verbleiben. Auf Grund der hervorragenden Saugfähigkeit der Wundauflage kann diese schwer werden und vollgesogen zu hängen beginnen. Sind die Kristalle mit Feuchtigkeit vollgesogen, können sie Druck auf das Wundbett ausüben und einen Wechsel der Eclipse-Auflage erforderlich machen.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

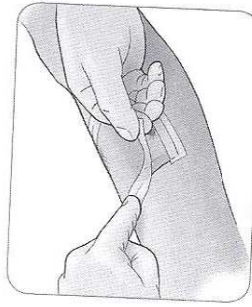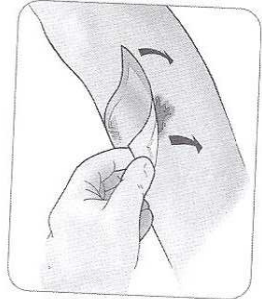

STERILE/O



CE 0086