

GYNELLA®

Natal Ferti Gel

VOM KINDERWUNSCH ZUR SCHWANGERSCHAFT

- ➔ Unterstützt die **Beweglichkeit der Spermien**.
- ➔ Verwandelt den Vaginal- und Zervixschleim mit Hilfe der benötigten Mikronährstoffe in eine **spermafreundliche Umgebung**.
- ➔ Hilft, einen für die **natürliche Empfängnis geeigneten pH-Wert** zu erhalten.



GYNELLA® Natal Ferti Gel

6 Einwegapplikatoren à 5 ml

Medizinprodukt, PZN 15863155

GYNELLA® Natal Ferti Gel ist ein Vaginalgel für Paare mit Kinderwunsch.

Die auf Zuckerarten, Mineralsalzen, Kreatin, Carnitin, Hyaluronsäure und Milchsäure basierende Rezeptur:

- erzeugt eine für Spermien optimale Umgebung,
- hilft dabei, einen zur natürlichen Empfängnis geeigneten pH-Wert zu erhalten,
- besitzt eine Osmolalität, die der von Samenflüssigkeit entspricht,
- verhindert eine ansteigende Viskosität der Samenflüssigkeit.

Wirkmechanismus: GYNELLA® Natal Ferti Gel sollte vor dem Geschlechtsverkehr während der Ovulationsphase verwendet werden, wenn sich die Eigenschaften des Zervixschleims ändern. In dieser Phase wird der Zervixschleim alkalischer und GYNELLA® Natal Ferti Gel unterstützt das Aufrechterhalten dieses pH-Werts, der hilfreich für eine natürliche Empfängnis ist. Des Weiteren verdickt sich das Sperma nach dem Samenerguss und es dauert etwa 30 Minuten für den Prozess der Verflüssigung, bis die Spermien ihre Viskosität verlieren und sich einfacher bewegen können. Die Anwendung von GYNELLA® Natal Ferti Gel hält die Viskosität der Samenflüssigkeit niedrig und hilft dabei, die Zeit zu reduzieren, die Spermien brauchen, um die Eizelle zu erreichen. Diese verschiedenen Maßnahmen können die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Empfängnis erhöhen.

Anwendung: GYNELLA® Natal Ferti Gel sollte während der Ovulationsphase, insbesondere während der fruchtbarsten Tage der Periode angewandt werden (13. bis 15. Tag).

Das Gel sollte 5 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr angewandt werden.

1. Vor dem Geschlechtsverkehr die Verschlusskappe der Tube entfernen.
2. Die Spitze der Applikatortube in die Vagina einführen.
3. Den Applikator zusammendrücken, sodass das Gel in den Vaginalkanal fließt.

Nebenwirkungen: Bei normaler Verwendungsweise sind derzeit keinerlei Nebenwirkungen in Bezug auf die Verwendung von GYNELLA® Natal Ferti Gel bekannt. Die Verträglichkeit wurde bestätigt. Falls es dennoch zu Irritationen oder allergischen Reaktionen kommen sollte, stoppen Sie die Verwendung und kontaktieren Sie Ihren Gynäkologen.

GYNELLA® Natal Ferti Gel ist ein Gel, das nicht färbt,

Konservierungsstoffe enthält, die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und das frei von Parabenen, Silikonen und Mineralölen ist.

Warnhinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Einwegapplikator: Der Inhalt jeder Tube sollte in einer einmaligen Anwendung verbraucht werden. Die Applikatoren sollten ordentlich verschlossen und geschützt vor Licht und Hitzequellen aufbewahrt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum gilt für ordentlich gelagerte Ware. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Das Produkt ist nicht steril. Es handelt sich nicht um ein Produkt zur Empfängnisverhütung. GYNELLA® Natal Ferti Gel hat keine spermienabtötende Wirkung. Nicht verwenden bei beschädigter Vaginalschleimhaut, direkt nach operativen Eingriffen oder bei akuten vaginalen Infektionen. Nicht schlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Falle von Überempfindlichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit quartären Ammoniumverbindungen. Die Missachtung dieser Warnhinweise und der Anwendungshinweise kann die Wirkweise des Produkts beeinträchtigen und kann bestehende Probleme verschlimmern sowie bisher nicht vorhandene Probleme hervorrufen.

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat, Myo-Inositol, Milchsäure, Wasser, Glukose, Fruktose, Magnesiumcitrat, Calcium Pyruvat, Sorbit, Zitronensäure, Kaliumcitrat, Natriumbikarbonat, Zinkgluconat, Carnitin, Kreatin, Natriumchlorid, DMDM-Hydantoin, Natriumhydroxid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Lagerung: Unter 25°C lagern.

Verpackung: Jede Packung enthält 6 Einwegapplikatoren à 5 ml GYNELLA® Natal Ferti Gel zur einmaligen Anwendung sowie einen Beipackzettel.

Hersteller: HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik

Dieses Medizinprodukt darf nicht dem Abwasser oder dem Hausmüll zugeführt werden. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker bezüglich der Entsorgung nicht benötigter Artikel. Dies dient dem Schutz unserer Umwelt.

Datum der Revision des Textes: Dezember 2018