



cerascreen®

Zöliakie Test



Bluttest auf Glutenunverträglichkeit

Eine Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) kann unter anderem zu Appetitlosigkeit, Leistungsschwäche und Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung und Blähungen führen, wenn Betroffene Gluten zu sich nehmen. Da die Symptome oft zeitversetzt auftreten und recht unspezifisch sind, ist es für viele schwierig, die Krankheit schnell zu erkennen.

Helfen kann ein Test: Mit dem cerascreen® Zöliakie Test erhalten Sie einen Hinweis auf eine mögliche Zöliakie. Dazu bestimmt unser Partnerlabor die Konzentration der Gewebs-Transglutaminase-Antikörper in Ihrem Blutserum.

- + Messung des wichtigen Zöliakie-Laborparameters tTG-IgG
- + zuhause Blutprobe entnehmen – einfach + diskret
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + direkt umsetzbare Empfehlungen + Tipps
- + Ergebnis innerhalb von wenigen Tagen nach Probeneingang

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Zöliakie Test

Der Zöliakie Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Zöliakie Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Zöliakie Test nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Zöliakie Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Zöliakie Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist außerdem nicht dazu geeignet, Krankheiten zu diagnostizieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Zöliakie Test:

<https://www.cerascreen.de/products/zoeliakie-test>



PZN 11343401

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

