

ALUXA PRO

Durch die enthaltenen Substanzen in der Kombilösung von Aluxa Pro werden Kontaktlinsen gereinigt und feucht gehalten.

Außerdem steigert die Lösung den Tragekomfort.

Bei regelmäßiger Anwendung werden Proteinablagerungen entfernt, die sich auf Kontaktlinsen ansammeln.

Dieses Produkt ist für alle weichen Kontaktlinsen geeignet.

Dazu gehören herkömmliche Kontaktlinsen, Austauschlinsen, Einweglinsen, etc.

Inhaltsstoffe:

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumcitrat, Poloxamer, Hydroxypropymethylcellulose, 0,02 %

Dinatriumedetat und 0,0001 % Polihexanid in gereinigtem Wasser.

Anwendung:

1. Waschen Sie sich vor dem Berühren der Kontaktlinsen gründlich die Hände.

2. Nehmen Sie eine der Kontaktlinsen heraus und spülen Sie sie einige Sekunden lang ab.

3. Geben Sie eine ausreichende Menge der Kombilösung in den Aufbewahrungsbehälter, so dass die Linse beim Einlegen komplett von der Flüssigkeit bedeckt ist und legen Sie die abgespülte Linse hinein.

Sie müssen die Kontaktlinse nicht abreiben.

Tun Sie dies nur, wenn es Ihnen von Ihrem Optiker empfohlen wurde.

In diesem Fall bringen Sie 2 oder 3 Tropfen der Kombilösung auf die Kontaktlinse und reiben Sie diese etwa 20 Sekunden lang vorsichtig ab.

4. Nehmen Sie die andere Kontaktlinse heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

5. Bewahren Sie die Kontaktlinsen für eine einwandfreie

Reinigung und Desinfektion über Nacht bzw. mindestens sechs Stunden lang in einem geschlossenen Behälter auf.

6. Bevor Sie die Linse erneut einsetzen, spülen Sie diese einige Sekunden lang mit der Lösung.

Einmal in der Woche mit Enzymen reinigen:

Diese Kombilösung entfernt automatisch die Proteinablagerungen auf der Linse, so dass eine wöchentliche enzymatische Reinigung ausreicht. Bei einer starken Verschmutzung der Linse kann dennoch eine Reinigung mit Enzymtabletten erforderlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen:

- - Verwenden Sie immer eine frische Kombilösung. Entsorgen Sie die im Linsenbehälter verbliebene Lösung vom Vortag.
- - Bewahren Sie die Flasche gut verschlossen auf, wenn Sie sie nicht verwenden und vermeiden Sie es, mit der Tropfvorrichtung jegliche Oberflächen zu berühren.
- - Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist. Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
- - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- - Patienten, die auf einen der Bestandteile des Produktes allergisch reagieren, dürfen es nicht verwenden.
- - Bei andauernden Beschwerden oder Reizungen, nehmen Sie die Linsen heraus, benutzen Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Optiker.
- - Die Linsen dürfen höchstens 30 Tage im geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

Informationen zum Kauf:

PZN: 6412519