



Zorflex® | LA

*Low Adherent*


Instructions for use

**Chemviron**  
A Kuraray Company

**CE**  
0120  
Rev 01



### Antimikrobielle, geruchsabsorbierende primäre Wundauflage

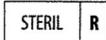

Antimikrobielle und geruchsabsorbierende primäre Wundauflage.  
Nur zum einmaligen Gebrauch. Trocken aufbewahren (< 25 °C / < 77 °F).  
Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

### Beschreibung

Die Wundauflage Zorflex LA ist ein Stoff aus reinen aktivierten Karbonfasern, auf dem beidseitig eine gering anhaftende Schicht aufgetragen ist. Sie ist komfortabel und gewährleistet stets den Kontakt mit der Wundoberfläche. Zorflex LA ist von grauer bis schwarzer Farbe, wobei mögliche Farbnuancen die Wirksamkeit nicht beeinträchtigen. Sie bildet eine wirksame antimikrobielle Barriere gegen mikrobielle Kontamination und schützt die Wunde vor eindringenden Mikroorganismen, die die Wundheilung beeinträchtigen können. Ebenso wirksam ist Zorflex LA gegen bereits in der Wunde vorhandene Mikroorganismen. Die Wirksamkeit der Zorflex®-Schicht als antimikrobielle Barriere bleibt mindestens 7 Tage erhalten. Zorflex® reduziert nachweislich Geruch, Schmerzen und Exsudation. Zorflex® ist leitfähig. Zorflex LA lässt sich trocken verwenden oder nach dem Anfeuchten mit sterilisiertem Wasser.

### Anzeigen

Zorflex LA ist angezeigt als eine antimikrobielle und anschmiegsame Wundauflage auf nässenden oberflächlichen und tiefen Wunden, beispielsweise Hohlräumen und Fisteln, Traumata, Operationswunden, exulzierenden Karzinomen, Druckgeschwüren, Venengeschwüren, Diabetesgeschwüren, Verbrennungen sowie Spender- und Empfänger-Transplantationsstellen.

### Gegenanzeigen

Keine.

### Vorsichtsmaßnahmen

Zum Reinigen, Spülen und Befeuchten der Wunde sterilisiertes Wasser verwenden. Die Verwendung von Produkten auf Ölbasis, topischen Salben oder Salzwasser mindert die Wirksamkeit von Zorflex LA. Nur zum einmaligen Gebrauch. Bei erneuter Verwendung kann die Wirksamkeit des Produktes vermindert sein und es können Kreuzkontaminierungen auftreten.

### Verwendungshinweise

- Wunde mit sterilem Wasser reinigen.
- Wundauflage formgerecht zuschneiden, bei offensichtlicher Mazeration die Wundumgebung mit abdecken. Nicht reißen.
- Zorflex LA mit einer beliebigen Seite auf die Wundoberfläche legen.
- Die Wundauflage mittels eines geeigneten sekundären Verbandmaterials oder einer Kompressionsbehandlung fixieren. Alternativ eine Auflagenfixierung, eine Bandage oder einen Tapeverband verwenden. Im Falle stark exsudierender Wunden ist eine absorbierende sekundäre Wundauflage angebracht. Zorflex LA ermöglicht die Weitergabe des Exsudats in die sekundäre Wundauflage, die nach Bedarf ausgewechselt werden sollte, ohne die Zorflex LA oder den Wundgrund zu beeinträchtigen.
- Trocknet die Wundauflage ein oder haftet sie an der Wunde an, die Auflage mit sterilisiertem Wasser anfeuchten oder durchnässen, um sie leichter entfernen zu können und ein Aufreißen der heilenden Wunde zu vermeiden.
- Zorflex LA kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, oder gemäß klinischer Indikation. Alle sich von der Wundauflage lösenden Fäden und Fasern sind leicht zu erkennen und zu entfernen.
- Das Produkt ausschließlich gemäß den Hinweisen verwenden.
- Das Produkt sollte unter entsprechender Aufsicht durch Gesundheitspersonal verwendet werden.

### Produktverfügbarkeit

| Artikelnummer | Größe                               | Produktverfügbarkeit |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| ZLA10         | 10,5 cm x 10,5 cm (4 1/8" x 4 1/8") | Nur im Beutel.       |
| ZLA15         | 15 cm x 25 cm (6" x 10")            | Nur im Beutel.       |
| ZLA20         | 20 cm x 10 cm (8" x 4")             | Nur im Beutel.       |

### Hersteller

Chemviron Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate  
Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB  
Zorflex® Handelsmarke von Chemviron Carbon.