




COMPRESSANA TWIST

ca. 18 mmHg
Stützklasse III forte


TWIST-Kniestrümpfe sind mit hochwertiger Baumwolle hergestellt und überzeugen durch eine sportlich elegante Optik. Sie passen zu allen Anlässen in Beruf und Freizeit und sind zugleich ideale Reisestrümpfe. Die besonders effektive Stützwirkung sorgt für eine spürbar wohltuende Entlastung der Beine.

- **besonders fein & elegant**
- **luftig & leicht**
- **anschmiegsam**

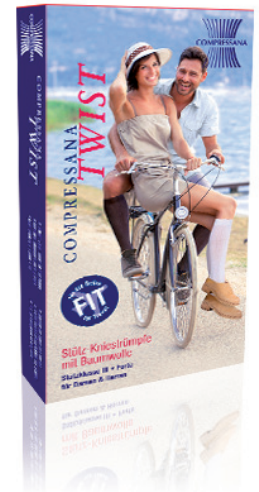

Produkt	Größe	Farbe
TWIST Kniestrümpfe mit Baumwolle	I-VI 36-48	weiß
		vanilla
		schoko
		anthrazit
		nachtblau
		schwarz

**TWIST auch in den
Trendfarben** Größe 36-46 (I-V):

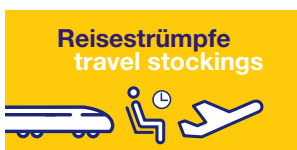

Größenübersicht

Größentabelle COMPRESSANA TWIST mit Schuhgröße

I	II	III	IV	V	VI
36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48
3 ^{1/2} -5	5-6 ^{1/2}	6 ^{1/2} -8	8-9 ^{1/2}	9 ^{1/2} -11	11-12 ^{1/2}

Anzieh- und Pflegehinweise

COMPRESSANA Funktionsstützstrümpfe ziehen Sie an wie normale Socken. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und darauf, dass die Zehen nicht eingeklemmt sind. Stülpen Sie die Strümpfe nicht um, so vermeiden Sie Einschnürungen. Regelmäßiges Tragen wird empfohlen.

Auch nach vielen Wäschen behalten **TWIST** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen
• **keine Weichspüler verwenden**

