



Mepilex - Silikonbeschichteter Schaumverband mit Safetac Technologie

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel¹
- Absorbiert effektiv das überschüssige Exsudat und minimiert Mazerationen²
- Passt sich hervorragend den Körperkonturen an und gewährt optimalen Patientenkomfort

Polyurethanschaum

- Absorbiert Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Passt sich den Körperkonturen an

Safetac® Technologie

- Atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut
- Haftet nicht am feuchten Wundgrund, sondern nur auf trockenem Gewebe
- Minimiert das Mazerationsrisiko



Polyurethanfilm

- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Viren- und bakterienundurchlässig


Safetac
TECHNOLOGY

Safetac® Technologie

Safetac® Technologie. Less trauma. Less pain.™

Safetac® ist eine patentierte, sanfte Silikon-Haftechnologie. Verbände mit Safetac® Technologie sind sowohl atraumatisch während des Tragens, als auch beim Entfernen. Dies bedeutet weniger Schmerz für den Patienten. Außerdem verhindern Verbände mit Safetac® Technologie Mazerationen, da die Wundränder versiegelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.safetac.com.

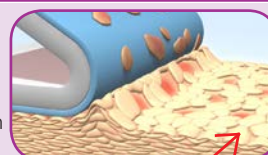

Entfernen von Epidermiszellen mit traditionellem Kleber



Kein Entfernen von Epidermiszellen mit der Safetac® Technologie

Anwendungshinweise



Reinigen Sie die Wunde und entfernen Sie die Schutzfolie.



Mepilex sollte die Wunde mindestens 2 cm überlappen. Mepilex mit der haftenden Seite auf die Wunde applizieren. Den Verband nicht überdehnen.



Falls notwendig, fixieren Sie den Verband zusätzlich mit einem geeigneten Fixiermittel.

Vorteile von Mepilex

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel
- Kann je nach Zustand mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Verweilt während der Applikation des Fixierverbandes am Platz und ermöglicht eine einfache Handhabung
- Minimiert das Mazerationsrisiko
- Gewährt optimalen Patientenkomfort
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Auf jede Größe zuschneidbar
- Sehr geringes Allergiepotehtial³

Anwendungsgebiete

Mepilex[®] ist für eine Vielzahl von flachen, nässenden Wunden geeignet wie z.B.:

- Bein- und Fußgeschwüre
- Druckgeschwüre
- Traumatische Wunden

Hinweis

Im Falle von Anzeichen einer Infektion, ziehen Sie bitte medizinisches Fachpersonal zu Rate, um eine adäquate Behandlung der Infektion zu gewährleisten.



References: 1 Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004. 2 Data on file, 3 Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100.



Sortiment Mepilex ist einzeln steril verpackt

Art.-Nr.	Größe (cm)	PZN Packung	Stück Packung	Stück Karton
29 41 00*	10 x 10	---	5	70
29 42 00*	10 x 20	---	5	50
29 43 00*	15 x 15	---	5	60
29 44 00*	20 x 00	---	2	12
29 41 50**	10 x 12	16 03 338	5	50
29 42 50**	12 x 20	16 03 350	5	50
29 43 50**	15 x 17	16 03 373	5	25
29 44 50**	20 x 22	16 03 404	5	20
294500	20 x 50	12 35 461	2	10
Mepilex Heel				
28 81 00	13 x 20	47 91 062	5	25

Verbandmittel sind CE geprüfte Medizinprodukte und keine Arzneimittel!
Verbandmittel sind weiterhin verordnungsfähig.

* Krankenhaus Sortiment ** Home Care Sortiment

Mölnlycke Health Care GmbH
Max-Planck-Str. 15 · 40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211/92088-0 · Fax: 0211/92088-170
www.molnlycke.com · www.safetac.com

Mepilex[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mölnlycke Health Care.

