

Naclens Enzym

Enzymatische Tabletten - Neue Formel
Zur Reinigung weicher und gasdurchlässiger Kontaktlinsen aller Art

PZN 2249198
10 Tabletten

NACLENS ENZYM:

enthält einen Wirkstoff, der Eiweiß- und sonstige Materialpartikel entfernt, die sich durch den täglichen Gebrauch auf der Linse abgelagert haben. Naclens Enzym wirkt auf Eiweiße, Fette, Mucin und Kalzium.
Wir empfehlen eine wöchentliche Anwendung von Naclens Enzym.

WEICHE KONTAKTLINSEN:

Allgemeine Gebrauchsanweisung (Einweglösungen)

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände und spülen Sie sie gut ab.
2. Füllen Sie den Linsenbehälter mit Disop Kombilösung.
3. Geben Sie eine Tablette Naclens Enzym hinzu.
4. Legen Sie die Kontaktlinsen in ihre entsprechenden Döschen.
5. Lassen Sie die Kontaktlinsen die ganze Nacht über bzw. mindestens sechs Stunden in der Lösung.
6. Spülen Sie die Kontaktlinsen, bevor Sie sie wieder einsetzen, gut mit Disop Kombilösung ab.

Gebrauchsanweisung mit Arion Cronos (einstufige Peroxidmethode)

Hände waschen und abspülen. Linsenbehälter mit Desinfektionslösung Arión Cronos füllen, eine Tablette Naclens Enzym sowie eine Neutralisationstablette hinzugeben und im übrigen nach obiger Gebrauchsanweisung vorgehen.

Bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen, spülen Sie sie mit Naclens Kochsalzlösung gut ab.

GASDURCHLÄSSIGE KONTAKTLINSEN:

Gebrauchsanweisung

Gehen Sie nach obiger allgemeiner Gebrauchsanweisung vor, aber verwenden Sie statt Disop Einweglösung Durasol Konservierungslösung.
Spülen Sie die Linsen, bevor Sie sie wieder aufsetzen, gründlich mit Durasol Konservierungslösung ab.

ZUSAMMENSETZUNG:

Jede Tablette enthält 1,5 mg Subtilisin und Lösungsmittel c.s

Vertrieb in Deutschland:

Osmed UG
Frankfurter Str.
58095 Hagen
Tel: 02331/788290
Fax: 02331/7882929
e-Mail: info@osmed.de
web: www.osmed.de