

## Gebrauchsanweisung

# Rhinomer

## Nasenspray

Steriles, natürliches isotones Meerwasser

**⚠ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Rhinomer Nasenspray anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Zur sanften Reinigung und Befeuchtung der Nase

### 1. Was ist Rhinomer Nasenspray und wofür wird es angewendet?

Rhinomer Nasenspray enthält steriles, isotones Meerwasser.

Der Salzgehalt des Meerwassers wurde verringert (= isotonisiert), so dass Rhinomer Nasenspray sicher für eine häufige Anwendung ist. Durch das spezielle Verfahren bleiben nahezu alle im Meerwasser enthaltenen Mineralien und Spurenelemente in Rhinomer Nasenspray erhalten.

#### Zweckbestimmung

- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut
- Zur Unterstützung der Reinigungsfunktion des Flimmerepithels der Nasenschleimhaut.

Rhinomer Nasenspray wird insbesondere zur Behandlung bei Säuglingen ab dem 15. Lebensstag, Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen empfohlen.

Rhinomer Nasenspray ist auch zur regelmäßigen Anwendung geeignet.

Rhinomer Nasenspray kann normalerweise auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Rhinomer Nasenspray beachten?



Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.

### 3. Wie ist Rhinomer Nasenspray anzuwenden?

Als natürliches Meerwasser kann Rhinomer Nasenspray so oft wie nötig verwendet werden.


#### Dosierung:

- Säuglinge ab dem 15. Lebensstag und Kleinkinder (bis 2 Jahre): Je nach Bedarf, 1 Sprühstoß mehrmals täglich in jedes Nasenloch,

- Kinder (ab 2 Jahre und älter) sowie Erwachsene sprühen mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch.

#### Hinweise zur Anwendung:

Für Kinder wird die Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.

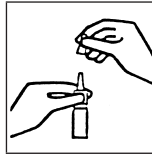

1. Schutzkappe abnehmen.
2. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Für alle weiteren Anwendungen ist das Dosierspray sofort gebrauchsfertig.
3. Halten Sie die Flasche aufrecht und führen Sie die Sprühöffnung vorsichtig in ein Nasenloch ein. *Säuglinge:* Bringen Sie Ihr Baby in eine aufrechte Position.
4. Sprühen Sie mit aufrechtem Kopf in jedes Nasenloch.
5. Lassen Sie die Lösung einige Sekunden wirken.
6. Vorgang am anderen Nasenloch wiederholen.
7. *Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren:* Nase schnäuzen.

#### Hygienehinweis, um Kontaminationen zu vermeiden:

Spülen Sie den Nasenadapter nach jeder Anwendung mit heißem Wasser und trocknen ihn ab. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche. Das Spray sollte nur von einer Person verwendet werden. Bei Verwendung durch mehr als eine Person besteht die Möglichkeit einer Übertragung von Infektionen.

### 4. Zu Ihrer Sicherheit

Falls die nasalen Symptome länger als 5 Tage bei Säuglingen und länger als 7-10 Tage bei Kindern und Erwachsenen anhalten, konsultieren Sie bitte medizinisches Fachpersonal.

Bei einer Reizung der Nasenschleimhaut kann während des Gebrauchs ein vorübergehendes Kribbeln in der Nase auftreten.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums.

Bei weiteren Fragen zur Anwendung dieses Produktes fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 5. Wie ist Rhinomer Nasenspray aufzubewahren?

**Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern auf.**

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums.

Nach Anbruch darf das Produkt nicht länger als 6 Monate angewendet werden.  
Zwischen 0 °C and 30 °C lagern.  
In der Originalpackung aufbewahren.

## 6. Weitere Informationen

**Zusammensetzung:** 100 % natürliche, isotone Meerwasserlösung (entsprechend 9 g/l NaCl)  
Steril  
Ohne Konservierungsstoffe  
Ohne Treibgas


**Rhinomer Nasenspray ist erhältlich als 20 ml Dosierspray**

 Laboratoire de la Mer, Z.A.C. de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, France

### Vertrieb

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

 80258 München

 Barthstraße 4, 80339 München

Telefon (089) 78 77-209

Telefax (089) 78 77-304

E-Mail: [medical.contactcenter@gsk.com](mailto:medical.contactcenter@gsk.com)

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

A-6391 Fieberbrunn


Tel +43 / (0)5354) 563350

Email: [gsk@gebros.com](mailto:gsk@gebros.com)

 0459

Medizinprodukt

STERILE A

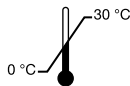


**Stand der Information:** April 2020



### Bedeutung der Symbole

 Vorsicht. Vor Gebrauch beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

 Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

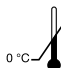 0 °C — 30 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung

 Verwendbar bis

 **LOT** Chargenbezeichnung

 Nach dem Gebrauch wegwerfen

 Recyclingsymbol für Papier

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an GSK.  
A72-0



CN0T1348