

# DracoAlgin

## Alginatkomresse

**DracoAlgin** ist eine sterile Alginatkomresse aus Calciumalginat-Fasern. Bei Kontakt mit Wundexsudat wirkt **DracoAlgin** stark absorbierend, aktiviert die Wundheilung und fördert den Reinigungs- und Granulationseffekt. Die Wundflüssigkeit wird durch das feine Kapillarsystem gleichmäßig im Alginat verteilt. Die Fasern verbinden sich, **DracoAlgin** wird beim Verbandwechsel mit einer sterilen Pinzette in einem Stück entfernt und die Wunde anschließend gespült.

### Anwendungsgebiete:

**DracoAlgin** ist geeignet für stark bis mäßig exsudierende, oberflächliche oder tiefe Wunden, chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisch), Dekubitus, Spalthautentnahmestellen und schwach blutende akute Wunden wie z.B. Abschürfungen oder Schnittwunden.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoAlgin** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoAlgin** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, ggf. falten und locker in die Wunde direkt auf das Wundbett aufbringen. Dabei ist darauf zu achten, dass **DracoAlgin** nicht über die Wundränder hinausgeht, um die Benetzung der Wundumgebung mit Exsudat zu vermeiden.

Anschließend die Wunde mit einer geeigneten sekundären Wundaufgabe abdecken und mit dem bevorzugten Verbandmaterial fixieren. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoAlgin** bei nicht infizierten Wunden bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Die Wundaufgabe sollte gewechselt werden, wenn **DracoAlgin** vollständig Wundflüssigkeit aufgenommen hat. Bei infizierten Wunden ist die Wundaufgabe unter ärztlicher Aufsicht täglich zu wechseln.



**DracoAlgin** darf nur einmal verwendet werden.

**DracoAlgin** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

**DracoAlgin** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

### Gegenanzeigen:

**DracoAlgin** soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit gegenüber Alginaten angewendet werden.

**DracoAlgin** soll nicht angewendet werden bei:

- trockenen Wunden
- Verbrennungen 3. Grades
- chirurgischen Implantaten

### Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm      PZN: 13858003

10 cm x 10 cm    PZN: 01003785

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

**CE 0482** **STERILE R**       25°C  
4°C

Rev.: 200706RW-13910-GA

