




Homocystein Test

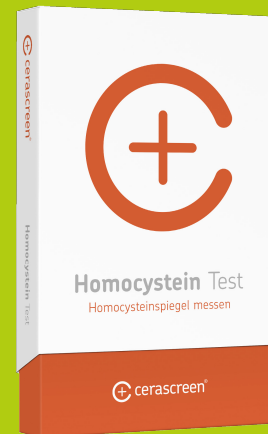

Homocysteinspiegel messen

Beugen Sie Bluthochdruck und Arteriosklerose vor. Kommt zu viel der Aminosäure Homocystein im Körper vor, steigt unter anderem das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Häufig steckt hinter dem hohen Homocysteinspiegel ein Mangel an B-Vitaminen, manchmal aber auch bestehende Krankheiten. Wenn Sie Ihren Homocysteinspiegel kennen, können Sie diese Risiken besser einschätzen und gezielt gegensteuern.

Der cerascreen® Homocystein Test ist ein Probenahme- und Einsende-Testkit für zuhause. Im Labor wird der Homocystein-Wert in Ihrem Blut untersucht.

Der Homocystein-Wert ist ein erster Hinweis auf bestehende Erkrankungen und Krankheitsrisiken. Für eine endgültige Diagnose sprechen Sie bitte mit Ihren Ärzt*innen.

- + zuhause Blutprobe entnehmen – einfach + diskret
- + Homocystein gibt einen Hinweis auf Krankheitsrisiken
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + digitaler Ergebnisbericht mit Empfehlungen zur Prävention
- + Ergebnis innerhalb von 1 Woche nach Probeneingang

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.


Homocystein Test

Der Homocystein Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Homocystein Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Homocystein Test nicht machen.
- + Der Homocystein Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu geeignet, Krankheiten zu diagnostizieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Homocystein Test:

<https://www.cerascreen.de/products/homocystein-test>

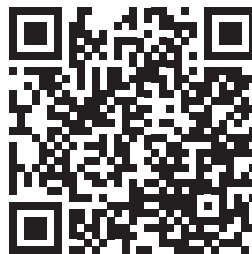

PZN 18114945

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands kostenlos zurückgesendet werden.

