

## **ADAPTIC 7.6X7.6 2012**

### **ADAPTIC 7,6x7,6 cm feuchte Wundauflage 2012DE**

PZN: 12477894

Inhalt: 50 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

#### **Zweckbestimmung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: - Verbrennungen 1. und 2. Grades, - Ulcus cruris - Dekubitus - diabetischer Fuss - Abszessen und Ekzemen - Verbrühungen und Verätzungen - Nagelextraktion - Schürf- und Risswunden - sowie chirurgischen Nähten. - für Spender- und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

#### **Zusammensetzung**

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseseide), getränkt mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: - Vaselinum album (White Petrolatum gem. USPXXII) - Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998) - Sorbitansesquioleat - Aqua purificata (Ph. Eur.)