

Medihoney® Optimale Wundheilung

Anwendungshinweise

- Wunde sollte bei jedem Verbandwechsel mit Standardmethoden gereinigt werden.
- Schützen Sie den Wundrand mit Medihoney® Schutzcreme.
- Der antibakterielle medizinische Honig Medihoney® bzw. das Wundgel werden direkt in die Wunde appliziert.
- Stellen Sie sicher, dass der antibakterielle medizinische Honig Medihoney® bzw. das Wundgel in vollem Kontakt mit der Wunde ist (mindestens 3 mm dick auftragen).
- Die sekundäre Wundauflage sollte ausreichend saugfähig sein (am besten superabsorbierende Wundverbände/Superabsorber verwenden), um die Menge an überschüssigem Wundexsudat aufzunehmen.

Medihoney® Wundheilungsprozess

Medihoney® Wundverbandmittel schützen die Wunde, indem eine Barriere gegen Krankheitserreger einschließlich antibiotikaresistenter Stämme gebildet und somit das Risiko von Infektionen reduziert wird. Durch das hohe osmotische Potenzial von Medihoney® wird die Exsudatbildung anfangs begünstigt, wodurch Bakterien, Endotoxine, Beläge und nekrotisches Gewebe aus der Wunde gespült werden und eine rasche Geruchstilgung eintritt. Das Resultat ist eine saubere Wunde, wodurch Entzündungen, Ödeme und Exsudation vermindert werden. Durch die Herstellung des optimalen Heilungsmilieus werden die Granulation und Epithelisierung gefördert.

Unterschied Medihoney®-Verbandmittel medizinischer Honig und Wundgel

Der medizinische Honig besteht zu 100% aus der reinen medizinischen Honigmischung (Medihoney® Antibakterieller Medizinischer Honig) und eignet sich prinzipiell für alle Wundtypen, insbesondere tiefe Wunden. Das Wundgel besteht zu 80% aus dieser Honigmischung und zu 20% aus pflanzlichen Verdickungsmitteln, welche dem Produkt den salbenartigen Charakter verleihen, sodass es nicht verläuft. In ihrer Effizienz sind beide Produkte ähnlich.

Medihoney® ist die sinnvolle Lösung zur optimalen Behandlung von akuten und chronischen sowie infizierten und schlecht heilenden Wunden!

Erstattungsfähigkeit der Medihoney-Wundverbandmittel

Welche Verbandmittel sind erstattungsfähig?

Verbandmittel sind Medizinprodukte, die in Europa den strengen Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (MDD) genügen müssen. Die nationale Umsetzung in Deutschland ist das Medizinproduktegesetz.

Alle Medihoney Wundverbandmittel sind CE-zertifizierte Medizinprodukte der Klasse II b mit der Zweckbestimmung als Verbandmittel zur Therapie von Wunden.

Verbandmittel sind immer CE-zertifizierte Medizinprodukte, die einer der entsprechenden Medizinprodukte-Klassen zugeordnet sind.

Jedes auf diesem Weg zugelassene Verbandmittel mit CE-Kennzeichnung und Pharmazentralnummer (PZN) ist uneingeschränkt erstattungsfähig.

Die Festlegung als Verbandmittel ergibt sich aus der Zweckbestimmung des Medizinprodukts und der damit verbundenen korrekten Einstufung in die entsprechende Medizinprodukte-Klasse im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens durch die benannte Stelle.

Welche Verbandmittel darf ein Arzt verordnen?

Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben Anspruch auf die Versorgung mit Verbandmitteln nach § 31 Abs. 1 SGB V. **Verbandmittel sind verordnungsfähig.** Sie fallen nicht unter die Ausschlussregelung nach § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und auch nicht unter die Regelung für arzneimittelähnliche Medizinprodukte nach § 31 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB V.

Grundsätzlich ist eine **Verordnungsmöglichkeit** im Rahmen von Individualverordnungen durch den Arzt gegeben, wobei keine Differenzierung zwischen traditioneller, klassischer und moderner Wundversorgung erfolgt und somit die **Erstattungspflicht** der gesetzlichen Krankenkassen zwingend erfolgen muss.

Medihoney®
Wundverbandmittel und
Hautpflegeartikel sind in
allen Apotheken und im
medizinischen Fachhandel erhältlich.

In mehr als 270 wissenschaftlichen Publikationen wurde die Wirksamkeit des medizinischen Honigs belegt. Die Übersicht der wissenschaftlichen Publikationen zu Medihoney finden Sie unter

www.medihoney.de

Medihoney® Generalvertrieb
in Deutschland:

ApoFit

ApoFit Arzneimittelvertrieb GmbH
Jäckstr. 29
96052 Bamberg
Tel.: 0951/510 760 0
Fax: 0951/510 760 29
E-Mail: info@apofit-gmbh.de
Internet: www.apofit-gmbh.de

Medihoney® Wundverbandmittel sind CE-zertifizierte, sterile Medizinprodukte zur Wundbehandlung.

ApoFit

**DER SPEZIALIST
FÜR WUNDHEILUNG!**



Medihoney® – Das Original!
Der medizinische Honig zur effektiven
und effizienten Wundheilung.



*Die Lösung für akute
und chronische
sowie infizierte Wunden.*

ApoFit

ApoFit Arzneimittelvertrieb GmbH
www.apofit-gmbh.de

Das Problem:
akute, chronische, infizierte oder schlecht heilende Wunden!

Die Lösung:
Wundheilung mit Medihoney®-Verbandmitteln

Medihoney® – Ihre Vorteile

- Antibakteriell
- Wirksam u. a. gegen MRSA, VRE, ESBL, Pseudomonas
- Wirksam gegen Biofilme
- Keine Resistenzbildung
- Keine Kreuzresistenz
- Anti-entzündlich
- Schützt die Wunde
- Reinigt die Wunde
- Fördert die Wundheilung
- Schützt vor Wundinfektion
- Reduziert Wundgeruch
- Reduziert die Bildung von Narbengewebe
- Fördert ein idealfeuchtes Wundheilungsmilieu
- Optimiert den Wundheilungsprozess
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Verbessert den Patientenkomfort

Indikationen / Anwendungsgebiete

- Akute und chronische Wunden
- Infizierte Wunden
- Chirurgische Wunden / Operationswunden
- Transplantationsstellen
- Tiefe Wunden
- Verbrennungen / Verbrühungen
- Wunden mit Fistelgängen
- Nekrotische Wunden
- Diabetische Wunden
- Belegte Wunden
- Fuß-/Beinulzera
- Dekubiti
- Übel riechende Wunden
- Schlecht heilende Wunden
- Schnitt- und Schürfwunden
- Oberflächliche Wunden

Medihoney®

sterile Wundverbandmittel zur effektiven und effizienten Behandlung von Wunden.

Medihoney®-Verbandmittel als Tubenvariante universell zur Wundbehandlung einsetzbar

Medihoney – 100% medizinischer Manuka Honig Wundverbandmittel



| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|---|----------|
| 01807727 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Medizinischer Honig | 1 x 20 g |
| 01807779 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Medizinischer Honig | 1 x 50 g |
| 05017086 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Medizinischer Honig | 5 x 20 g |

Medihoney Wundgel – 80% medizinischer Manuka Honig Wundverbandmittel



| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 09205152 | MEDIHONEY™ Antibakterielles Wundgel | 1 x 10 g |
| 01807710 | MEDIHONEY™ Antibakterielles Wundgel | 1 x 20 g |
| 10630067 | MEDIHONEY™ Antibakterielles Wundgel | 1 x 50 g |
| 04920252 | MEDIHONEY™ Antibakterielles Wundgel | 5 x 20 g |
| 01807733 | MEDIHONEY™ Antibakterielles Wundgel | 20 x 10 g |

Medihoney-Wundverbandmittel mit medizinischem Manuka Honig



| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|---|----------|
| 11691728 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Tüllverband, 5 x 5 cm | 5 Stück |
| 07299456 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Tüllverband, 10 x 10 cm | 5 Stück |
| 05994838 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Gelverband, 5 x 5 cm | 10 Stück |
| 05994844 | MEDIHONEY™ Antibakterieller Gelverband, 10 x 10 cm | 10 Stück |
| 07617761 | MEDIHONEY™ Apinate Alginateverband, 5 x 5 cm | 10 Stück |
| 06550641 | MEDIHONEY™ Apinate Alginateverband, 10 x 10 cm | 5 Stück |
| 07617755 | MEDIHONEY™ Apinate Rope Alginateverband, 2 x 30 cm | 5 Stück |

Medihoney Hydrogel-Wundverband

| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|---|----------|
| 11691734 | MEDIHONEY HCS Surgical Wundverband, 7,5 x 20 cm adhesiv | 10 Stück |
| 07241988 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 7,2 x 7,2 cm adhesiv | 10 Stück |
| 07241994 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 11,5 x 11,5 cm adhesiv | 10 Stück |
| 07241505 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 6 x 6 cm non-adhesiv | 10 Stück |
| 07241528 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 11 x 11 cm non-adhesiv | 10 Stück |
| 11483088 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 20 x 20 cm non-adhesiv | 5 Stück |
| 11483094 | MEDIHONEY™ HCS Hydrogelverband 20 x 30 cm non-adhesiv | 2 Stück |

Medihoney – Medizinprodukte zum Hautschutz mit medizinischem Manuka Honig



| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|------------------------|----------|
| 05994815 | MEDIHONEY™ Schutzcreme | 1 x 50 g |
| 05994821 | MEDIHONEY™ Dermacreme | 1 x 50 g |

Schutzcreme (Barrier Cream):

- Zur Pflege feuchter und nasser Hautstellen
- Zum Schutz des Wundrands / der Umgebungshaut
- Schützt vor Hautschäden durch Reibung
- Schützt die Haut bei Inkontinenz
- Hilft Mazeration und Exkoration zu vermeiden
- Zur Vorbeugung von Windeldermatitis
- Zur Vorbeugung von Hautschäden durch häufiges Händewaschen



Dermacreme:

- Zur Pflege trockener bis sehr trockener Haut
- Hilft Follikulitis zu vermeiden
- Hilft Juckreiz zu lindern
- Schutz bei intakter, anfälliger und gefährdeter Haut
- Schutz vor Hautschäden durch Reibung



Medihoney – Hautpflegeprodukte mit Manuka Honig



| PZN | PRODUKTNAME | PACKUNG |
|----------|--|---------|
| 11164377 | MEDIHONEY™ Natural Skintensive Creme | 95 g |
| 11164383 | MEDIHONEY™ Natural Moisturising Lotion | 250 ml |
| 11164408 | MEDIHONEY™ Natural Soap Free Wash | 250 ml |