

Reparil® Ice-Spray Madaus



PZN -01881095

Gebrauchsinformation

Zusammensetzung: Butan, Pentan, Isobutan, Propan, Isopropylalkohol, Menthol, Campher. Mit angenehmer frischer Duftnote.

Hinweis: Reparil® Ice-Spray Madaus enthält keine künstlichen Duft- und Aromastoffe.

Anwendungsgebiete: Für die zuverlässige Kühlung bei Prellungen, Zerrungen, Muskelkrämpfen und Blutergüssen. Reparil® Ice-Spray Madaus ist als erste Hilfe besonders für geschlossene Sportverletzungen geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden verwenden. Reparil® Ice-Spray Madaus sollte nicht in Kontakt mit den Augen gelangen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Reparil® Ice-Spray Madaus auf die betroffenen Hautflächen aus mindestens 15 cm Entfernung aufsprühen. Bei Bedarf kann Reparil® Ice-Spray Madaus mehrfach angewandt werden. Höchstens 5 Sekunden lang auf eine Stelle sprühen (Gefahr von Erfrierungen). Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern unter 6 Jahren.

Hinweis zur Anwendung: Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion dieses Applikationssystems zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes: Reparil® Ice-Spray Madaus darf nur bis zu dem auf dem Behältnis mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Reparil® Ice-Spray Madaus wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und keimfrei in das Behältnis mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist daher eine Konservierung nicht erforderlich.

Stand der Information: September 2015

Vertrieb:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg

CE 0297

Hersteller:
MADAUS GmbH, Colonia-Allee 15, 51067 Köln

LOT s. Bodenaufdruck 3 270

Mindestens verwendbar bis : s. Bodenaufdruck

M.-Nr.: 55DE05139952-00



Zur Kühlung bei Sportverletzungen

Ohne künstliche Duft- und Aromastoffe

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

MEDA
Medizinprodukt
200 ml Lösung zum Aufsprühen auf die Haut



Hochdruckzylinder