

DracoFoam

Infekt haft sensitiv

Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für infizierte Wunden

DracoFoam Infekt haft sensitiv ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie Begünstigung eines idealfeuchten Wundmilieus. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. Die Sensitiv-Silikon-Technologie des Haftrandes unterstützt eine hautschonende atraumatische Entfernung des Verbandes bei gleichzeitig guter Haftung.

DracoFoam Infekt haft sensitiv enthält die antimikrobiell wirkende Substanz Polyhexanid (PHMB), welche in der Wundauflage als antimikrobielle Barriere fungiert, die Mikroorganismen aus dem Wundexsudat aufnimmt und einer Kolonisierung bzw. Verbreitung von Bakterien innerhalb der Wundauflage entgegenwirkt. Dadurch können Wundinfektionen verhindert bzw. die Ausbreitung eingedämmt werden.

Anwendungsgebiete:

DracoFoam Infekt haft sensitiv ist geeignet für akute sowie chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus, diabetisches Fußulcus, Verbrennungen 2. Grades sowie Hautspenderareale.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt haft sensitiv** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. Entnehmen Sie **DracoFoam Infekt haft sensitiv** aus der sterilen Einzelverpackung und entfernen Sie die erste Schutzfolie, ohne dabei das Wundkissen zu berühren. Bringen Sie den Verband mit dem Wundkissen zur Wunde hin an und entfernen Sie die zweite Schutzfolie. Drücken Sie die Kleberänder anschließend sanft an. Die Sensitiv-Silikon-Technologie erlaubt ein Repositionieren des Verbandes, um eine faltenfreie Applikation zu erzielen. Dank des Haftrandes des Produkts wird keine weitere Fixierung benötigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht und der Haftrand nicht auf die Wunde geklebt wird. Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann



