



# COMPRESSANA TWIN




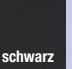

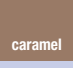
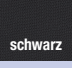
ca. 21 mmHg  
**Stützklasse IV** strong

TWIN-Kniestrümpfe sind mit hochwertiger Baumwolle hergestellt und überzeugen durch eine sportlich elegante Optik. Sie passen zu allen Anlässen in Beruf und Freizeit und sind zugleich ideale Reisestrümpfe. Die besonders effektive Stützwirkung sorgt für eine spürbar wohltuende Entlastung der Beine.

**Flauschig, weich, angenehm und gleichzeitig effektiv und haltbar. Zudem hochwertig und beständig durch garngefärbte Baumwolle. Auch für sportliche Höchstleistungen und zur Regeneration.**

- sehr effektive Stützwirkung



Produkt	Größe	Farbe
 <b>TWIN Kniestrümpfe</b> geschlossene Fußspitze mit Baumwolle	I-VI 35-48	  
 <b>TWIN Peep-Toe Kniestrümpfe</b> offene Fußspitze mit Baumwolle	I-VI 35-48	 

**TIPP**  
offene  
Fußspitze


## Anzieh- und Pflegehinweise

COMPRESSANA Funktionsstützstrümpfe ziehen Sie an wie normale Socken. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und darauf, dass die Zehen nicht eingeklemmt sind. Stülpen Sie die Strümpfe nicht um, so vermeiden Sie Einschnürungen. Regelmäßiges Tragen wird empfohlen.

Auch nach vielen Wäschen behalten **TWIST** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

**Vor dem Tragen waschen • auf links waschen • keine Weichspüler verwenden**

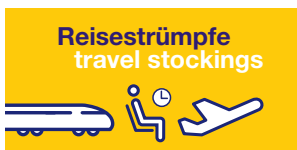

## Größenübersicht

Größentabelle COMPRESSANA TWIST mit Schuhgröße

I	II	III	IV	V	VI
36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48
3 1/2-5	5-6 1/2	6 1/2-8	8-9 1/2	9 1/2-11	11-12 1/2

