

IsoFree®

Sterile Isotonische Kochsalzlösung (Natriumchloridlösung, 0,9 %)
Zur Befeuchtung der Atemwege und zur Anwendung mittels Vernebler
Für die tägliche Nasenhygiene

BESCHREIBUNG

IsoFree® ist eine gebrauchsfertige, sterile isotonische Kochsalzlösung, die zur **Befeuchtung der oberen und unteren Atemwege** sowie zur Aerosoltherapie durch Verneblung mit einem elektrisch betriebenen Düsenvernebler oder Ultraschallvernebler eingesetzt werden kann. Sie kann z.B. als begleitende Maßnahme bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten (z.B. Husten oder Schnupfen) sowie bei geringer Luftfeuchtigkeit nach langem Aufenthalt in klimatisierten oder geheizten Räumen angewendet werden.

IsoFree® kann:

- **ohne weiteren Zusatz** zur Befeuchtung der oberen und unteren Atemwege angewendet werden. Beachten Sie bitte genau die Angaben in der Gebrauchsanweisung Ihres Verneblers.
- **in Verbindung mit anderen Präparaten** angewendet werden, d.h. **IsoFree®** kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden. Bitte beachten Sie bei Anwendung von **IsoFree®** in Verbindung mit einem Arzneimittel genau die Verdünnungsangaben in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels.

IsoFree® kann auch zur **täglichen Nasenreinigung** bei Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Erwachsenen, insbesondere bei folgenden Befindlichkeitsstörungen, verwendet werden:

- Erkältung
- Bronchitis
- Asthma
- allergischer Schnupfen z.B. Heuschnupfen
- häufiger Aufenthalt in überheizten oder klimatisierten Räumen
- bei Aufenthalt in belasteter Umgebung (Staub, Smog)

IsoFree® schützt die Nasenschleimhaut sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor dem Austrocknen und verhindert eine übermäßige Schleimproduktion, indem der natürliche Feuchtigkeitsgehalt der Nasenschleimhaut wieder hergestellt wird. So wird die natürliche Reinigung Ihrer Atemwege unterstützt, was sich nicht nur bei Entzündungen, sondern auch bei vermehrter Staub- und Schadstoffbelastung (z.B. Staub oder Tabakrauch) positiv bemerkbar macht.

Bei Säuglingen dient **IsoFree®** zur Befreiung

der Nase von Schleim und erleichtert somit das Füttern und verkürzt die Einschlafzeit. **IsoFree®** kann auch zur Reinigung der Nase bei Kleinkindern eingesetzt werden, die noch nicht in der Lage sind, sich die Nase durch Schnäuzen zu reinigen.

ANWENDUNG ZUR INHALATION

Bei Anwendung zur Verneblung mit einem elektrisch betriebenen Düsenvernebler oder Ultraschallvernebler, den Inhalt eines Eindosisbehältnis in den Vernebler nach Angaben des Herstellers Ihres elektrisch betriebenen Düsenverneblers oder Ultraschallverneblers füllen. Die Dauer der Inhalation richtet sich nach der Art und Ausstattung Ihres Inhalationsgerätes und kann daher etwas variieren. Sie sollte für ein Eindosisbehältnis 20 Minuten nicht überschreiten. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres verwendeten Inhalationsgerätes.

ACHTUNG: Beachten Sie bitte in jedem Fall genau die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihres Inhalationsgerätes.

Bei Anwendung von **IsoFree®** in Verbindung mit einem Arzneimittel, bitte die Gebrauchsinformation des zu inhalierenden Arzneimittels vor Verwendung sorgfältig lesen und beachten. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

Vorbereitung der Inhalation

Öffnen Sie den Vernebler entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung Ihres Inhalationsgerätes.

Öffnen Sie ein Eindosisbehältnis und füllen Sie **IsoFree®** in den hierfür vorgesehenen Behälter Ihres Inhalationsgerätes. Bei Anwendung von **IsoFree®** in Verbindung mit einem Arzneimittel, bitte die Verdünnungsangaben in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels befolgen. Schließen Sie den Vernebler und nehmen Sie das Gerät entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung Ihres Inhalationsgerätes in Betrieb.

Inhalation mit dem Mundstück

Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig über das Mundstück ein und atmen Sie nach

wenigen Sekunden durch die Nase aus. Bei Mundstücken mit Ausatemventil kann über das Mundstück ein- und ausgeatmet werden.

Inhalation mit der Maske

Halten Sie die Maske auf Ihr Gesicht, so dass Mund und Nase dicht umschlossen sind. Führen Sie den Inhalationsvorgang wie oben beschrieben durch.

ANWENDUNG FÜR DIE NASENHYGIENE

Säuglinge und Kleinkinder: 1 – 3mal täglich oder direkt vor dem Füttern einige Tropfen in jedes Nasenloch geben. Für *IsoFree*[®] gibt es keine Altersbeschränkung und kann somit auch bei Kleinkindern und Säuglingen angewendet werden.

Erwachsene: je nach Bedarf jeweils 1 Eindosisbehältnis 1 – 3mal (maximal 4mal) täglich anwenden. Dieses Produkt kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Es enthält keine Konservierungsmittel.



1. Trennen Sie ein Eindosisbehältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass das Eindosisbehältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das Kopfe des Eindosisbehältnisses ab (nicht ziehen).



2. Legen Sie den Kopf des Kindes etwas zurück und führen Sie die Öffnung des Eindosisbehältnisses vorsichtig in das Nasenloch ein.



3. Tropfen Sie die benötigte Menge Lösung in das Nasenloch.



4. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Nasenloch.



5. Heben Sie den Kopf des Kindes und wischen Sie überschüssige Lösung weg. Lassen Sie die Lösung kurze Zeit einwirken, bevor Sie die Nase des Kindes reinigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht zur Injektion verwenden.
- Nicht verwenden bei beschädigtem Eindosisbehältnis.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da *IsoFree*[®] keine Konservierungsmittel enthält, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.

- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Eindosisbehältnis sowie auf der Faltschachtel eingepreßt.

- *IsoFree*[®] befindet sich in kleinen Kunststoffbehältern, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie deshalb *IsoFree*[®] unzugänglich für Kinder auf.

***IsoFree*[®] kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden. Vor dieser Anwendung muss die Gebrauchsinformation des Arzneimittels sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.**

ZUSAMMENSETZUNG



100 ml Lösung enthalten: Natriumchlorid 0,9 g; Wasser für Injektionszwecke

PACKUNGSGRÖSSEN

20 Eindosisbehältnisse mit je 2,5 ml isotonischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %)
60 Eindosisbehältnisse mit je 2,5 ml isotonischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %)
25 Eindosisbehältnisse mit je 5 ml isotonischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %)

LAGERUNG

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen.

 Chargen-Nummer und  verwendbar bis sind auf dem Eindosisbehältnis eingepreßt.


 aseptische Herstellung

 nur zum Einmalgebrauch

 Gebrauchsanweisung beachten

 Lagerungstemperatur (Temperaturbegrenzung)

 0483

 nicht verwenden bei beschädigter Verpackung (Eindosisbehältnis).

Hersteller und Vertrieb

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln
Tel.: + 49 9435 30 71 38
Fax: + 49 9435 30 71 39
E-mail: info@penta-arzneimittel.de
Internet: www.penta-arzneimittel.de

Stand der Information
06/2016


ARZNEIMITTEL