

Zeckenzange

Vor Anwendung die Gebrauchshinweise aufmerksam lesen und Anleitung zum späteren Nachschlagen sicher aufbewahren.

Die Zeckenzange Tick Twister® ist ein von der Firma H3D entwickeltes Gerät, um Zecken unterschiedlicher Größe schnell, vollständig und schmerzlos beim Menschen zu entfernen.

Was beinhaltet diese Anleitung?

1. Was ist die Zeckenzange Tick Twister®?
2. Wann sollte sie angewandt werden?
3. Wie wendet man die Zeckenzange Tick Twister® an?
4. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
5. Was macht man, wenn es ein Problem gibt?
6. Welche Nebenwirkungen kann es geben?
7. Packungsinhalt
8. Weitere Informationen

1. Was ist die Zeckenzange Tick Twister®?

Die Zeckenzange Tick Twister® macht es möglich, Zecken unterschiedlicher Größe vollständig, schnell, schmerzlos und sicher beim Menschen zu entfernen, ohne Einsatz von chemischen Produkten.

Die Zeckenzange Tick Twister® wird angewandt:

- Bei sich selbst oder einer anderen Person jeden Alters (von Säuglingen bis zu Senioren);
- Überall am Körper;
- An jedem Ort/in jeder Umgebung;
- Wenn nicht anders angegeben, kann die Zeckenzange Tick Twister® von Personen ab 14 Jahren angewandt werden.

Klinischer Nutzen:

Unabhängig von der klinischen Leistung, die darin besteht, Zecken unterschiedlicher Größe vollständig und sicher zu entfernen, beansprucht H3D keinen klinischen Nutzen beim Gebrauch seiner Zeckenzange. H3D beansprucht insbesondere keinen klinischen Nutzen hinsichtlich Infektionen und deren Folgen, die unabhängig von der ordnungsgemäßen Zeckenentfernung auftreten können, je nachdem, wie lange die Zecke auf dem Patienten festgesessen hat.

2. Wann muss sie angewandt werden?


- Das Gerät ist ausschließlich zur Entfernung von Zecken gedacht.
- Wenn ein Zeckenbiss festgestellt wird, die Zecke so schnell wie möglich entfernen.
- Die der Größe der Zecke entsprechende Zeckenzange einsetzen:
 - Klein: für Larven – unter 1 mm.
 - Mittel: für junge Zecken zwischen 2 und 3 mm und ausgewachsene Zecken zwischen 5 und 8 mm.
 - Groß: für ausgewachsene, vollgesaugte Zecken zwischen 9 und 11 mm.
- Von der Anwendung in schwer erreichbaren Bereichen wie der Ohrmuschel wird abgeraten. In diesem Fall einen Arzt aufsuchen.

- Keine chemischen Produkte (Alkohol, Äther, Öl, ätherische Öle, Desinfektionsmittel ...) vor oder während der Entfernung benutzen.
- Die Bissstelle mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfizieren.
- Die Zeckenhaken an einem trockenen, lichtgeschützten Ort, an dem sie nicht verbogen und der Spalt nicht beschädigt werden kann, aufbewahren.

3. Wie wendet man die Zeckenzange Tick Twister® an?

a. Die Entfernung der Zecke erfolgt durch Drehung; dadurch kann die Zecke komplett gezogen werden, ohne dass das Rostrum (Rüssel) in der Haut des Patienten steckenbleibt. Choisissez le tire-tique le plus adapté à la taille de la tique.

- Die der Größe der Zecke entsprechende Zange nehmen.
- Die Zeckenzange unter die Zecke schieben, von der Seite ansetzen, bis sie fest sitzt.
- Die Zeckenzange DREHEN, egal in welche Richtung. Nach zwei bis drei Drehungen löst sich die Zecke.

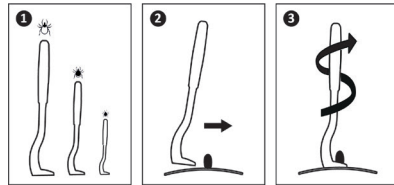

b. Nach erfolgreicher Entfernung der Zecke:

- Die Bissstelle mit einem antiseptischen Mittel desinfizieren.
- Die Zecke in ein Klebeband wickeln und im Mülleimer entsorgen.

c. Nach jedem Gebrauch die Zeckenzange reinigen:

- Mit handelsüblichem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder einfach mit Wasser und Seife.
- Mit einem weichen Tuch abreiben;
- Per Handwäsche;
- Mit einem weichen Tuch abtrocknen oder an der Luft trocknen.

d. Nach Gebrauch und Reinigung die Zeckenzange in ihrer Schachtel aufbewahren (falls beim Kauf eine beigelegt wurde) oder an einem Ort, der vor Beschädigung schützt.

e. Das Gerät ist wiederverwendbar.

- Sollte es dennoch beschädigt, verbogen oder der Spalt abgenutzt sein:
- Kann es recycelt werden;
 - Im Mülleimer (Mülltrennung beachten) entsorgt werden.

4. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- ⚠ **Untenstehende Hinweise aufmerksam lesen, damit das Gerät unter den besten Bedingungen und gefahrlos genutzt werden kann.**
- Von Kindern unter 14 Jahren fernhalten.
- Lässt sich die Zecke nicht entfernen, oder bleibt ein Teil davon in der Haut stecken, dann einen Arzt aufsuchen.
- Die Zeckenzange nicht benutzen, wenn:
 - Sich die Farbe verändert hat, sie verdreht/verbogen ist oder Materialverlust aufweist;
 - Der Spalt der Zeckenzange deformiert/abgenutzt ist;
 - Eine effiziente Reinigung der Zeckenzange nicht möglich war und Rückstände verblieben sind.
- Nicht an der Zecke ziehen und sie nicht zerdrücken. So kann das Rostrum abreißen und/oder sich die Gefahr einer Infektion erhöhen.

- Beim Herausziehen der Zecke nicht die Zeckenzange verdrehen oder biegen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn nach einem Zeckenbiss:
 - Rötungen oder ungewöhnliche Symptome auftreten;
 - Eine Entzündung der Stelle auftritt;
 - Eine Zecke zerteilt wird und ein Teil in der Haut verblieben ist;
 - Das Entfernen der Zecke unmöglich ist.
- Keinen scharfen Gegenstand benutzen, um den Spalt der Zeckenzange zu reinigen. Das könnte die Zeckenzange beschädigen und das wirksame Entfernen der Zecke beeinträchtigen.

Tritt eine Fehlfunktion auf, rufen Sie H3D an unter der Nummer +33 (0)4 74 75 86 72 und schicken Sie die Zeckenzange an folgende Adresse zurück: H3D – ZA Sous la Combe, 01590 LAVANCIA-EPERCY – FRANCE.

5. Was macht man, wenn ein Problem auftritt?

- Bei Rötungen, ungewöhnlichen Symptomen und/oder Entzündungen an der Bissstelle, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Mögliche Gründe: 1- Von der Zecke übertragene Bakterieninfektion. 2- Übertragung der Lyme-Krankheit durch Bakterien, die im Blut der Zecke vorhanden sind.
- Wenn die Zecke durch Unachtsamkeit beim Versuch, sie zu entfernen, zerteilt wurde, und ein Teil in Ihrer Haut zurückgeblieben ist, suchen Sie einen Arzt auf, um die in der Haut verbliebenen Teile der Zecke zu entfernen, und/oder wechseln Sie die Zeckenzange.
Mögliche Gründe: 1- Falsche Anwendung der Zeckenzange. 2 - Spalt oder Zeckenzange verbogen/verschlissen.
- Bleibt die Zecke trotz aller Versuche, sie herauszuziehen, in der Haut des Patienten stecken, bitte einen Arzt aufsuchen. Mögliche Gründe: 1- Falsche Anwendung der Zeckenzange. 2- Die Zecke sitzt an einer für die Zeckenzange schwer erreichbaren Stelle.
- Hat sich die Form oder Farbe der Zeckenzange verändert und/oder weist der Spalt der Zeckenzange Schäden auf (Materialverlust, Beulen ...), Zeckenzange wechseln.
Mögliche Gründe: normale Abnutzung der Zeckenzange.


6. Welche Nebenwirkungen kann es geben?

- Die Zeckenzange Tick Twister® darf nicht bei sich selbst oder anderen Personen angewandt werden:
- bei regelmäßig auftretendem Zittern,
 - bei Behinderungen, Verwirrung, neurologische Erkrankungen.
- Eine Ansteckung durch die Zecke kann entweder vor ihrer Entfernung oder durch nicht sachgemäße Entfernung eintreten. Die Zeckenzange Tick Twister® hat keinen Einfluss auf mögliches Auftreten oder Entwickeln von Krankheiten.

7. Packungsinhalt

Die Zeckenzange Tick Twister® besteht, den verschiedenen Verkaufs-Referenzen entsprechend, aus folgenden Teilen:

- 1 x Zeckenzange klein - 0,420 g - 3,6 x 0,6 cm
Für Larven (0,04 mm bis 1 mm)
- 1 x Zeckenzange mittel - 0,750 g - 4,7 x 0,8 cm
Für junge und ausgewachsene Zecken (2 mm bis 8 mm)
- 1 x Zeckenzange groß - 1,430 g - 6,3 x 1,3 cm
Für ausgewachsene, vollgesaugte Zecken (9 mm bis 11 mm)

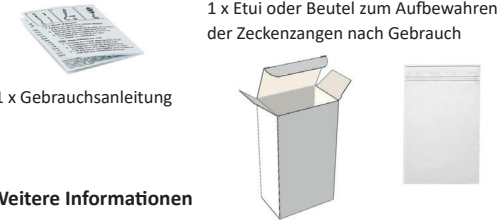

8. Weitere Informationen

Herstellereklärung

H3D erklärt, dass die Zeckenzangen Tick Twister® medizinische Geräte sind, die im Mai 2021 das CE-Zertifikat erhalten haben. Diese Geräte entsprechen den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen der EU-Verordnung 2017/745.

Medizinprodukte-Vigilanz

Kommt es bei der Anwendung zu einem schweren Zwischenfall, oder besteht der Verdacht, dass es bei der Anwendung des Produkts zu einem schweren Zwischenfall kommen kann, so muss sofort die H3D und ANSM, die zuständige französische Behörde, informiert werden unter folgender Adresse <https://ansm.sante.fr/documents/referance/declarer-un-effet-indesirable>
Für die anderen Länder gibt es eine Liste mit den entsprechenden zuständigen Behörden, siehe: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en#nca
Rubrik «vigilance contact point»

Markenzeichen

«Tick Twister» ist eine eingetragene Marke.

Urheberrecht

© H3D
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf vervielfältigt, bearbeitet, übertragen, verbreitet, verändert, zusammengeführt, übersetzt werden, gleich in welche Sprache oder in welcher Form – ob grafisch, elektronisch oder mechanisch einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fotokopie, Aufnahme oder Speicherung und erneuten Abruf von Informationen ohne schriftliche Genehmigung von H3D. Kopien des vorliegenden Dokuments sind illegal.

Änderungen

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir haben unser Möglichstes getan, um die Richtigkeit der Informationen dieses Dokuments zu gewährleisten. Sollten Ihnen fehlerhafte Informationen auffallen, so wenden Sie sich an den Kundendienst unter folgender E-Mail-Adresse: info@h3dfrance.com oder telefonisch über +33 (0)4 74 75 86 72.

Kontaktieren Sie uns / Hilfe

Bei Fragen oder Problemen mit der Zeckenzange Tick Twister®, kontaktieren Sie uns sofort per Mail an info@h3dfrance.com oder telefonisch über +33 (0)4 74 75 86 72 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.

H3D - ZA Sous la Combe
01590 LAVANCIA - FRANCE
Tel: +33(0)4 74 75 86 72
info@h3dfrance.com
www.h3dfrance.com