

höga



Duschpflaster

- Anwendung:** Die zu behandelnde Stelle sorgfältig reinigen und trocknen. Das Pflaster aus der Peelpackung nehmen.
- Seite mit weißem Trägerpapier:**
Wichtig: Entfernen Sie ein weißes Trägerpapier.
- Anbringen:** Kleben Sie das Pflaster ohne Überdehnung über die gewünschte Stelle und ziehen Sie den Rest vom weißen Trägerpapier ab.
- Seite mit transparenter Folie:** Entfernen Sie die transparenten, in blauer Pfeilrichtung markierten Trägerfolien.
- Pressen Sie einige Sekunden das Pflaster an um ein einwandfreies Anheften zu erzielen.

Material: Elastische Polyurethanfolie mit hypoallergenem Polyacrylatkleber. Frei von Latex, PVC und DEHP.

Verwendung: Zur Fixierung medizinischer Geräte, zum Schutz der Wunde und der Tätowierung

Steril, wenn Einzelpackungen ungeöffnet und unbeschädigt.

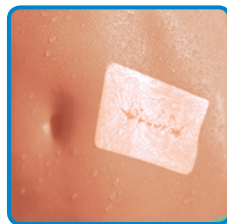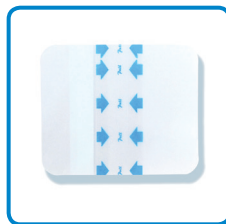

PZN-03687061



4 017949 004132

Yafho Bio-Technology Co., Ltd., Junfeng Rd., Huangpu District, Guangzhou 510760 Guangdong, CN
 Trocken bei -10 bis 45°C vor Licht geschützt lagern.
 LotuS N.L. B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands
 IMPORTEUR-VERTRIEB: HÖGA-PHARM, Gutmaninger Str. 17, 93413 Cham, Germany



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

HÖGA-PHARM e.K. • Gutmaninger Str. 17 • D-93413 Cham

höga

Duschpflaster

Transparentverband steril

höga

höga

Duschpflaster

Transparentverband steril
zum Schutz der Wunde

5 Stück
10 x 12 cm

- wasserdicht
- atmungsaktiv
- elastisch
- hypoallergen
- latexfrei

steril

...auch für
Tattoo's



10 x 12 cm

5 Stück

Transparentverband steril

Duschpflaster

höga

