

Gebrauchsinformation

Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

1 ml isotoner Lösung enthält 150 mg Meerwasser sowie Kaliumdihydrogenphosphat (zur Einstellung des pH-Wertes) und hochgereinigtes Wasser sowie 30 mg Dexpantenol.

1 Sprühstoß entspricht ca. 0,14 ml Lösung.

Ohne Konservierungsstoffe

Darreichungsform und Inhalt

Lösung zum Einsprühen in die Nase.
Flasche mit 20 ml Lösung entspricht ca. 140 Sprühstößen.

Anwendungsgebiete

Zur Befeuchtung, Reinigung und Pflege wunder Nasenschleimhaut wie z. B. als begleitende Maßnahme bei Schnupfen und verstopfter Nase.

Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray ist auch für Kleinkinder ab 2 Jahren geeignet.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit

Bei Gebrauch von **Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray** sind keine Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Es gibt bei bestimmungsgemäßer Anwendung keinen Hinweis auf ein besonderes Risiko während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln


Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray anwenden?

Geben Sie je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich 1–2 Sprühstöße in jedes Nasenloch.

Wie sollten Sie Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray anwenden?

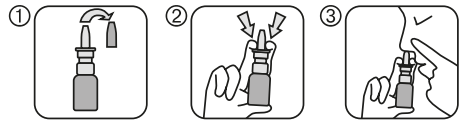

**Gelbe
Schutzkappe
abnehmen**

**Mit 2 Fingern
pumpen**

**Immer Düse
nach oben
halten**

Entfernen Sie die Schutzkappe. Nehmen Sie die Sprühflasche in die Hand und betätigen Sie den Spraymechanismus mehrmals bis zum Austritt eines feinen Nebels. Diesen Vorgang brauchen Sie bei den folgenden Anwendungen nicht zu wiederholen, da **Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray** nun für die weitere Anwendung gebrauchsfertig ist.

Zur jeweiligen Anwendung den Nasenadapter in das Nasenloch einführen und den Spraymechanismus 1- bis 2-mal betätigen und dabei leicht durch die Nase einatmen.

Bei gleichzeitiger Anwendung mit einem anderen Nasenspray (z. B. mit Schleimhaut abschwellender Wirkung) sollten Sie **Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray** vorher anwenden.

Die entnehmbare Füllmenge beträgt mindestens 20 ml. Da das Steigrohr für den Pumpmechanismus am Boden leicht geknickt ist, wird bei senkrechter oder schräger Haltung der Flasche während der Anwendung die Restmenge zwar erfasst, fließt aber nach dem Sprühstoß wieder in die Flasche zurück. Aus diesem Grund ist die tatsächliche (technische) Füllmenge größer als 20 ml – damit ist sicher gestellt, dass die deklarierten 20 ml problemlos entnommen werden können.

Hinweis zur Anwendung

Aus hygienischen Gründen sollte der Nasenadapter abgewischt und trocken gehalten werden. Jede Einheit ist nur von einer Person anzuwenden.

Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und in ein Behältnis mit speziellem Applikationssystem abgefüllt. Um die einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems zu gewährleisten, darf am Gesamtsystem der Sprayflasche nicht manipuliert werden (z. B. Trennung des Pumpenkopfes von der Flasche).

Wie lange sollten Sie Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray anwenden?

Wenden Sie **Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray** bis zum Abklingen Ihrer Beschwerden an. Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray kann, falls erforderlich, über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Nebenwirkungen

Während der Anwendung des Sprays können Sie ein leichtes Unwohlsein in der Nase verspüren. Diese Wirkung ist jedoch nur vorübergehend und klingt kurz nach der Anwendung ab.

Allergische Reaktionen mit Symptomen wie geschwollene Lippen, Kontaktdermatitis und Ausschlag an der Applikationsstelle wurden bei diesem Produkt beobachtet. Wenn diese Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, sollte die Anwendung von Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray abgebrochen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Nach Anbruch nicht länger als 6 Monate verwenden.

Wie ist Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

 Gebrauchsanweisung beachten!

Stand der Information: Februar 2022

 **ALIUD PHARMA**
STADA GROUP



Hersteller:

HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck

Vertrieb Deutschland:

ALIUD PHARMA GmbH,
Gottlieb-Daimler-Straße 19,
D-89150 Laichingen
Telefon: + 49 7333 9651-0,
Telefax: + 49 7333 9651-4000
www.aliud.de

Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray Nutzen Sie das Plus an Schutz und Pflege!

Unsere Nase – ein Wunderwerk der Natur! – hat nicht nur die Fähigkeit feinste Duftstoffe aufzuspüren, sondern bereitet die Luft auf, bevor sie in die Bronchien und die Lunge fließt. Und das funktioniert so: Die eingeatmete Luft wird in der Nase nicht nur erwärmt, sondern vor Allem auch gefiltert und gereinigt, sodass die Aufnahme von Staub, Pollen und Keimen gemindert wird. Um diese Filter- und Schutzfunktion unserer Nase zu sichern ist es wichtig, die Nasenschleimhaut intakt zu halten und vor dem Austrocknen zu schützen. Bei erhöhten Belastungen wie z. B. Reizung durch trockene Heizungsluft oder durch Kälte, bei Schnupfen oder auch bei allergischen Beschwerden ist die Unterstützung und Pflege der gestressten Nasenschleimhaut sinnvoll.

Genau da wirkt **Meerwasser AL Plus 20 ml Nasenspray**:

- **Befeuchtet, reinigt und pflegt die wunde Nasenschleimhaut**
 - bei trockener Heizungsluft
 - bei Kälte
 - in klimatisierten Räumen
 - im Flugzeug – ideal für Vielflieger
- **Löst Verkrustungen**
- **Zur begleitenden Behandlung bei Schnupfen**
- **Auch für Kleinkinder ab 2 Jahren geeignet**

Natürliches Meerwasser mit seinen wertvollen Mineral-Salzen reinigt und befeuchtet die Nasenschleimhaut auf natürlich sanfte Weise.

 0482