

zur Verfügung gestellt von [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info)

# Mepore<sup>®</sup> Film

CE 0086

STERILE EO

USA 1-800-882-4582  
Canada 1-800-494-5134



Single use  
Usage unique



MÖLNLYCKE  
HEALTH CARE


Mölnlycke Health Care AB (Publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Aktualisierungsstand [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info) November 2011

## Mepore Film 6 x 7 cm, 10 x 12 cm and 20 x 30 cm



## Mepore Film 15 x 20 cm and 10 x 25 cm

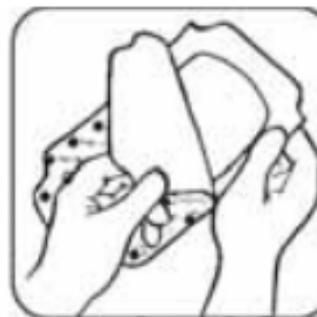

# Mepore® Film

Selbstklebender, atmungsaktiver Polyurethan-Transparentverband

## Produktbeschreibung

Mepore Film ist ein flexibler, transparenter und atmungsaktiver Polyurethan-Filmverband, der mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist. Zur Vereinfachung der Applikation ist der Verband mit einer Applikationshilfe aus Papier ausgestattet.

## Wirkungsweise

Mepore Film dient als flexible und transparente Abdeckung zum Schutz der Wunde, bei gleichzeitiger Anpassung an Hautunebenheiten und Körperkonturen.

Mepore Film erhält das feuchte Wundmilieu aufrecht, ermöglicht jedoch gleichzeitig die Feuchtigkeitsverdampfung von Wunde und umgebender Haut.

Mepore Film dient als Flüssigkeitsbarriere und zum Schutz vor bakterieller Kontamination.

## Einsatzgebiete

Mepore Film kann bei einer Vielzahl von Wunden in der Granulationsphase eingesetzt werden, wie z. B. oberflächliche Verbrennungen, Fixierung von Kanülen, Schürfwunden, Risswunden, Hautentnahmestellen, oberflächliche Druckgeschwüre, geschlossenen chirurgischen Wunden, und zur Prävention von Hautschäden eingesetzt werden.

Mepore Film kann auch zur Fixierung oder als Sekundärverband über Hydrogel-, Alginate und Schaumverbänden verwendet werden.

zur Verfügung gestellt von **Gebrauch.info**



## Bitte beachten

Mepore Film sollte nicht bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegenüber Acrylatkleber verwendet werden.

Mepore Film sollte nicht bei tiefen Wunden, bei denen Muskel-, Sehnen- oder Knochenverletzungen vorliegen, sowie bei Verbrennungen 3. Grades eingesetzt werden.

## Anwendungshinweise

Applikation:

1. Reinigen Sie den Applikationsbereich. Trocknen Sie die gesunde, wundumgebende Haut.
2. Wählen Sie einen Verband aus, der groß genug ist, um auf der gesunden, trockenen Haut oder Katheterstelle zu haften. Der Verband kann zugeschnitten oder überlappend eingesetzt werden.
3. Nur für die Größen 10x25 cm und 15x20 cm: Entfernen Sie auch den mittleren Bereich des Papierrahmens.
4. Entfernen Sie das bedruckte (Mepore) Schutzpapier zum Freilegen des Klebebereichs.
5. Applizieren Sie Mepore Film und entfernen Sie danach die Applikationshilfe.
6. Entfernen Sie die beiden seitlichen Papiersteifen.


## Verbandwechsel und -entfernung

1. Der Verband kann, abhängig von der Haut-/Wundsituation, über mehrere Tage verwendet werden bzw. wie nach medizinischer Notwendigkeit indiziert.
2. Lösen Sie eine Ecke des Verbandes und ziehen den Verband vorsichtig von der Haut (in Haarwuchsrichtung).

Sterilität wird garantiert, sofern die Sterilverpackung nicht vor Gebrauch beschädigt oder geöffnet wurde. Nicht re-sterilisieren.



**zur Verfügung gestellt von [Gebrauch.info](http://Gebrauch.info)**

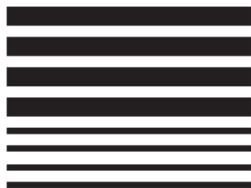

Revised 2009-05  
40394-05

**Aktualisierungsstand [Gebrauch.info](http://Gebrauch.info) November 2011**