

# Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte

Medizinprodukt zur Stillung von Nasenbluten

**5 Stifte zum einmaligen Einführen in die Nase**  
Geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 7 Jahren  
bei Nasenbluten im vorderen Nasenbereich.



## Eigenschaften

Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte werden zur mechanischen Stillung von Nasenbluten eingesetzt. Dabei wird durch den mechanischen Druck des Stiftes das geplatzte Blutgefäß zusammengedrückt. Die Blutung kommt zum Stillstand. Das in Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte enthaltene Hartfett schmilzt bei Körpertemperatur. Dadurch wird die Nasenschleimhaut leicht eingefettet und geschmeidig. Beim Herausnehmen des Reststiftes wird der Wundverschluss auf diese Weise geschont und die Wunde fängt nicht erneut an zu bluten.

## Dosierung und Dauer der Anwendung

Ein Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstift wird in das blutende Nasenloch eingeführt und sollte dort für mindestens 10 bis 15 Minuten verbleiben.

## Anwendung

Zuerst entnehmen Sie einen Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstift aus der Kunststoffolie. Führen Sie den Stift im Sitzen (nicht im Liegen!) mit der Spitze zuerst vorsichtig in das blutende Nasenloch ein. Dann halten Sie ein Taschentuch oder einen Wattebausch darunter und drücken den Stift leicht in die Nase. Der Stift sollte hauptsächlich im unteren Drittel der Nasenhöhle verbleiben. Verwenden Sie keinen zweiten Stift wenn der erste entfernt wurde oder nicht vollständig geschmolzen ist. Nach Stillstand der Blutung kann man den nicht geschmolzenen Teil ohne Schwierigkeiten herausnehmen. Bei längerem Verbleib in der Nase schmilzt der Stift vollständig. Bei einer Anwendung bei Kindern sollte der Stift von einem Erwachsenen eingeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Nasenstift nicht zu tief in das Nasenloch hineingeschoben wird.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Solange sich der Nasenstift in der Nase befindet, soll der Patient sitzen oder stehen und sich nicht hinlegen. **Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte sollten nicht bei Kindern unter 7 Jahren angewendet werden.** Bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe sollen Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte nicht angewendet werden. Beim Gebrauch sind Überempfindlichkeitsreaktionen nicht auszuschließen, die Stifte sollen dann nicht erneut angewendet werden. Starkes oder häufiges Nasenbluten oder Nasenbluten vor allem nach Unfällen kann schwerwiegende Ursachen haben. In diesen Fällen oder wenn Blutungen auch durch den Mund auftreten, ist eine Abklärung der Ursache durch einen Facharzt notwendig. Es liegen keine Daten über die Anwendung von Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird daher nicht empfohlen. Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



MED PHARMA SERVICE GMBH

Neuköllnische Allee 146 • 12057 Berlin



www.truw.de

# Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte

## Bestandteile

1 Stift à 1,0 g enthält: 925 mg Hartfett, 50 mg Basisches Bismutgallat, 25 mg Tannin (Gerbsäure).

## Packungsgröße

Die Packung enthält fünf Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte zum einmaligen Gebrauch.

## Wichtige Hinweise

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Kunststoffolie aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums. Verwenden Sie die Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte nicht mehr, wenn sie durch Wärmeeinwirkung in der Kunststoffolie geschmolzen waren und scharfe Kanten aufweisen. Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. **Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte sollen vor Hitze (Sonneneinstrahlung oder Heizung) geschützt aufbewahrt werden.**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nicht über 25°C aufbewahren.

Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte erhalten Sie in der Apotheke.



Stand der Gebrauchsanweisung: Mai 2023

Hersteller: Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, D-23562 Lübeck

Vertrieb: Med Pharma Service GmbH, Neuköllnische Allee 146, D-12057 Berlin

## Tipps zur Entnahme der Stifte aus der Kunststoffolie

Stryphnasal<sup>®</sup>N Nasenstifte ist ein Hartfettstift, der in Riegeln à 5 Nasenstifte verpackt ist. Die 5 Stifte sind einzeln mit der jeweiligen Verpackung durch Abreissperforation voneinander trennbar, sodass sie einzeln entnommen werden können. Zur Entnahme des Stiftes können Sie die doppelte Kunststoffolie am oberen geriffelten Ende einfach mit beiden Händen auseinanderziehen. Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, den 5er-Riegel in 5 einzelne weiterhin verpackte Nasenstifte zu trennen und jeweils den doppelt geriffelten Teil ein wenig auseinander zu biegen. So ist es einfacher, bei Nasenbluten einen Stift zu entnehmen.

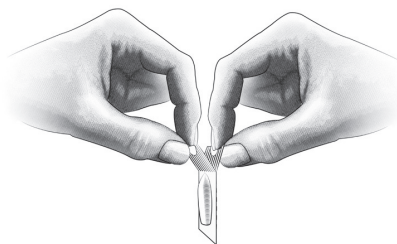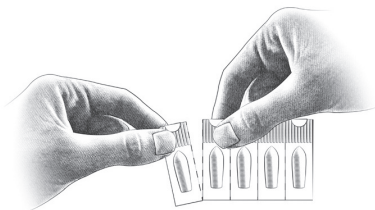

MED PHARMA SERVICE GMBH

Neuköllnische Allee 146 • 12057 Berlin



www.truw.de