

Gebrauchsanweisung

Applikator Köhler® 1 ml

Bei Applikator Köhler® 1 ml handelt es sich um eine Sprühvorrichtung, die es ermöglicht, niedervisköse flüssige Lösungen zu versprühen, die in Form von 1 ml Ampullen vorliegen.

Anwendung

Öffnen Sie die 1 ml Ampulle und führen diese dann von unten in den Ampullenhalter ein, bis Sie auf einen spürbaren Widerstand stoßen. Bitte achten Sie beim Einführen darauf, dass das Steigrohr / der Schlauch durch die Ampullenöffnung geführt wird und. Halten Sie dabei Ampulle und Applikator möglichst senkrecht.

Das Versprühen der Flüssigkeit erfolgt nun durch Drücken der Pumpeinrichtung mit dem Daumen oder Zeigefinger.

Wie dosieren Sie mit dem Applikator Köhler® 1 ml?

Ein Sprühstoß mit dem Applikator entspricht einem definierten Sprühvolumen von 0,14 ml pro Hub.

Was sollten Sie weiterhin beachten?

Bitte verwenden Sie den Applikator Köhler® 1 ml gemäß den Anwendungsempfehlungen Ihres Therapeuten. Bewahren Sie das System für Kinder unzugänglich auf. Geöffnete Ampullen sollen innerhalb von 1 bis 2 Stunden aufgebraucht und im Applikator stets senkrecht stehend aufbewahrt werden, siehe Abbildung (rechts unten). Ansonsten kann ein Auslaufen der Flüssigkeit nicht zuverlässig verhindert werden.


Der Applikator Köhler® 1 ml ist ein Einmalartikel und ist zur Verwendung jeweils nur für eine einzige Ampulle vorgesehen.

Hinweis zur Entsorgung

Zur separaten Entsorgung von Ampulle (Glas) und Ampullenhalter-System (Kunststoff) entnehmen Sie bitte die Glasampulle aus dem Ampullenhalter.

Packungsgröße

5 x Applikator Köhler® 1 ml PZN 3648457

Köhler Pharma GmbH 

Neue Bergstraße 3-7
64665 Alsbach
Telefon: 06257 - 506 529 0
Telefax: 06257 - 506 529 20
www.koehler-pharma.de

