

## Gebrauchsanweisung

### Comfort Tears® MDS®

(Natriumhyaluronat, 0.15 %)



### Beschreibung


**Comfort Tears** ist eine sterile, konservierungsmittelfreie, viskoelastische, klare Flüssigkeit für die Hornhaut. Sie enthält ausschließlich Substanzen, die im Auge natürlicherweise vorhanden sind. **Comfort Tears** schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei trockenen Augen bedingt durch:

- Trockene Augen (Sicca-Syndrom)
- Kontaktlinsentragen
- Klimaanlage, Wind, Kälte, trockene Hitze, Staub, Rauch, Luftverschmutzung
- Bildschirmarbeiten, lange Autofahrten, Langstreckenflüge

### Zusammensetzung

0.15 % Natriumhyaluronat, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat und aqua purificata

### Gebrauchsanweisung

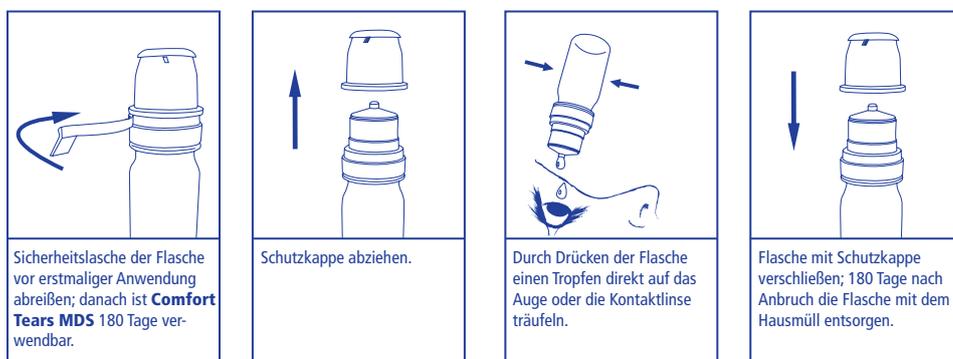

Durch leichte Lidmassage bei geschlossenen Lidern verteilt sich das Produkt nach dem Eintropfen schneller auf der Augenoberfläche.

### Lagerung

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen.

### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Nicht verwenden bei beschädigter Sicherheitslasche.
- Das Auge nicht mit der Flasche berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung der Flasche mit anderen Oberflächen oder den Händen vermeiden.
- Nicht zusammen mit Arzneimitteln zur Anwendung am äußeren Auge verwenden.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein. In diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen. Warten bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Anbruchdatum auf der Flasche notieren.
- Angebrochene Flasche 180 Tage nach dem Abreißen der Sicherheitslasche mit dem Hausmüll entsorgen.

### Packungsgröße

10 ml Mehr-Dosis-System (MDS)

### Hersteller

i.com medical GmbH  
Kafelerstr. 15, 81241 München, Deutschland  
www.i.com-medical.de

