



# MyDentalCleaner

## Reinigungs- und Pflegekonzentrat zur Anwendung in Ultraschallreinigern

Für herausnehmbaren Zahnersatz, kieferorthopädische Regulierungsapparate, Sportmundschutz, Interimsprothesen, Schnarcher- und Knirscherschienen

### Gebrauchsanweisung

#### Anwendungsgebiete

Herausnehmbarer Zahnersatz gefertigt aus Edelmetall (Gold-Silber-Platinlegierungen) mit Keramikverblendungen, Nichteinmetall (Kobalt-Chrom-Molybdän) mit Kunststoff- oder Keramikverblendungen; Knirscher-, Schnarcherschienen, Interimsprothesen bei Implantatversorgungen, Sportmundschutz aus Kunststoffen, Kieferorthopädische Schienen oder Regulierungsapparate für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

#### Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Das Konzentrat enthält Phosphorsäuremethylester und Phosphorsäure 5-15%, organische Lösungsmittel 1-5%, Tenside und Hilfsstoffe.

#### Dosierung

##### Bei Anwendung des Ultraschallreinigers Sinus Ultra 9611031:

20 ml Konzentrat in den Edelstahltank geben und mit ca. 400 ml warmem oder kaltem Wasser auffüllen. Es ergibt sich eine angenehm nach Minze duftende Reinigungs- und Pflegelösung.

##### Bei Anwendung des Ultraschallreinigers Dentasonic 2607:

10 ml Konzentrat in den Edelstahltank geben und bis zur Markierung im Tank mit warmem oder kaltem Wasser auffüllen. Es ergibt sich eine angenehm nach Minze duftende Reinigungs- und Pflegelösung.

Die Reinigungsdauer im Ultraschallbad beträgt zwischen 3 und 5 Minuten und kann je nach Bedarf wiederholt werden. Falls notwendig mit einer weichen Zahnbürste nachreinigen. Nach dem Reinigen die Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und mit einem weichen, staubfreien Tuch trocken tupfen.

Die Reinigungslösung kann je nach Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Teile 3 bis 4 mal verwendet werden. Danach sollte eine neue Lösung, wie oben beschrieben, angesetzt werden.

#### Gefahrenhinweise / Sicherheitsratschläge

Das Konzentrat reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Konzentrat nicht intraoral anwenden. Auf keinen Fall zum Mund ausspülen verwenden. Bei versehentlichem Verschlucken den Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt konsultieren.

#### Lagerung

Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Lagertemperatur -5° C – 30° C. Das Produkt ist nicht entzündlich.

#### Haltbarkeit

Siehe Verfallsdatum auf der Flasche. Nach erstmaligem Öffnen einer Flasche ist das Konzentrat 9 Monate haltbar!

#### Wichtige Hinweise

Das Produkt erhalten Sie von Ihrem Dentallabor oder Ihrer Zahnarztpraxis. Die regelmäßige Anwendung zuhause reinigt und pflegt Ihren Zahnersatz, Knirscher-, Schnarcherschienen, Sportmundschutz, Interimsprothesen und kieferorthopädische Apparate zur Zahnregulierung für ein angenehmes Mundgefühl und frischen Atem. Einmal im Quartal sollten Zahnersatz, Schienen, Sportmundschutz oder die kieferorthopädischen Apparate von Ihrer Zahnarztpraxis oder Ihrem Dentallabor professionell gereinigt und geprüft werden, um den Wert zu erhalten und die Passung zu überprüfen.

#### Hersteller

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstr. 9 • D-78112 St. Georgen

#### Vertrieb

MyDental GmbH • Rotehausstr. 36 • 58642 Iserlohn • E-Mail: [info@MyDental.de](mailto:info@MyDental.de)  
[www.MyDentalSmile.de](http://www.MyDentalSmile.de) • [www.MyDentalCleaner.de](http://www.MyDentalCleaner.de) • [www.MyDental.de](http://www.MyDental.de)

Stand: Juli 2012

Lieferformen: 50 ml Probierflasche, 300 ml