

10-807601



FÜR WEITERE INFORMATIONEN:  
QR-Code scannen oder  
[www.sterimar.de](http://www.sterimar.de) aufrufen



FÜR WEITERE INFORMATIONEN:  
QR-Code scannen oder  
[www.sterimar.de](http://www.sterimar.de) aufrufen

Die Marke STÉRIMAR™ gewinnt ihr Meerwasser aus der Bucht von Cancale (Bretagne-Frankreich), einem besonderen und geschützten Lebensraum, der für seine saubere Umwelt bekannt ist.

**ANWENDUNGSGEBIETE:**

STÉRIMAR™ Nasenhygiene Baby ist ein Medizinprodukt auf der Basis von Meerwasser, das für die tägliche Anwendung bei Babys ab der Geburt bis 3 Jahren empfohlen wird, für:

- Sanfte Reinigung der Nase und Beseitigung von Verunreinigungen (Staub, feine Schmutzpartikel, Schleim, Allergene, ...)
- Befeuchtung und Wiederherstellung der natürlichen Feuchtigkeit der Nasenschleimhaut (Heizung, Klimaanlage)
- Vorbeugung von HNO-Erkrankungen (Erkältungen, Ohrenentzündungen usw.) durch Stärkung der Abwehrkräfte der Nasenschleimhaut
- Verbesserung der Atmung zur Ermöglichung eines guten Schlafs und Erleichterung der Flaschenfütterung oder des Stillens

STÉRIMAR™ Sprays werden von Atemtherapeuten bei der Behandlung von Bronchiolitis eingesetzt.

**ZUSAMMENSETZUNG:**

STÉRIMAR™ Nasenhygiene Baby ist eine physiologische Meerwasserlösung mit einer Salzkonzentration, die den Zellen des menschlichen Körpers ähnlich ist. Das gefilterte, 100% natürliche und konservierungsmittelfreie STÉRIMAR™-Meerwasser profitiert von den anerkannten Eigenschaften von Mineralsalzen und marinen Spurenelementen wie Zink, Kupfer, Mangan, Eisen, Magnesium, Selen... Meerwasser • Gereinigtes Wasser.

Aseptisch verpackt. Inertes Treibgas: Stickstoff. Die Lösung kommt nicht mit Stickstoff in Kontakt.



# NASEN HYGIENE baby

Reich an Spurenelementen  
— Physiologisch —

- Reinigt sanft
- Beugt Erkältungen vor
- Patentierte Sicherheitsdüse

**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:**

Beim ersten Gebrauch einmal sprühen, um das System zu starten. **Zur Hygiene und Befeuchtung der Nasenschleimhaut:** Führen Sie die Düse vorsichtig in das Nasenloch ein. Sprühen Sie kurz ein- oder zweimal in jedes Nasenloch. Lassen Sie die überschüssige Lösung auslaufen, bevor Sie die Nase abwischen.

**Für eine tiefere Reinigung der Nasenhöhlen:** Legen Sie das Baby auf den Rücken, wenn es unter 2 Jahre alt ist, oder lassen Sie es sitzen, wenn es älter als 2 Jahre ist. Neigen Sie den Kopf des Babys zur Seite (niemals nach hinten) und führen Sie die Düse vorsichtig in das oberste Nasenloch ein. Geben Sie einen längeren Sprühstoß ab. Lassen Sie überschüssige Lösung aus dem anderen Nasenloch abfließen und wischen Sie dann die Nase ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf im anderen Nasenloch. **Nach jeder Anwendung die Düse mit heißem Wasser reinigen und abtrocknen.**

**DOSIERUNG:**

2 bis 6 Mal pro Tag anwenden.

**WARNHINWEIS**

Druckbehälter kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Beim Gebrauch nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



# NASEN HYGIENE baby

Reich an Spurenelementen  
— Physiologisch —

- Reinigt sanft
- Beugt Erkältungen vor
- Patentierte Sicherheitsdüse



[WWW.STERIMAR.DE](http://WWW.STERIMAR.DE)

SOFIBEL Laboratoires Fumouze  
110-114, rue Victor Hugo  
92686 Levallois-Perret Cedex - France

Übersetzungsbüro Robert und Janet Ball, Starowieg 8, 87257 Wertissen

Gewonnen aus der Bucht von Cancale

Ab der Geburt

0800 723 69 85 • Kunden Service Nummer

R07-2023



Gewonnen aus der Bucht von Cancale

Ab der Geburt

Nettovolumen: 100 ml e 176

OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL

KLINISCH ERWIESENE WIRKSAMKEIT

OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL

KLINISCH ERWIESENE WIRKSAMKEIT



5 010724 001387 >

LOT



1094 0815