


Cutimed® Sorbact®

Cutimed® Sorbact® – die innovative Lösung für die antimikrobielle Wundtherapie.

Produkt

Cutimed® Sorbact® mit seinem einzigartigen Wirkmechanismus hat sich als wirkstofffreie antimikrobielle Behandlung kontaminierter und infizierter Wunden erfolgreich bewährt. Durch das physikalische Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung werden Mikroorganismen irreversibel gebunden und inaktiviert. Infolge der reduzierten Keimzahl in der Wunde werden optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen. Die spezielle Beschichtung verleiht Cutimed® Sorbact® stark hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Pathogene Wundbakterien haben ebenfalls hydrophobe Eigenschaften und binden irreversibel an die Wundauflage. Cutimed® Sorbact® wirkt gegen Bakterien (auch MRSA und VRE) sowie gegen Pilze. Die Möglichkeit bakterieller Resistenzentwicklung wird durch Cutimed® Sorbact® ausgeschlossen, zusätzlich besteht kein Allergierisiko.

Cutimed® Sorbact® besteht aus Acetat- bzw. Baumwollgewebefasern, mit Dialkylcarbamoylechlorid beschichtet.

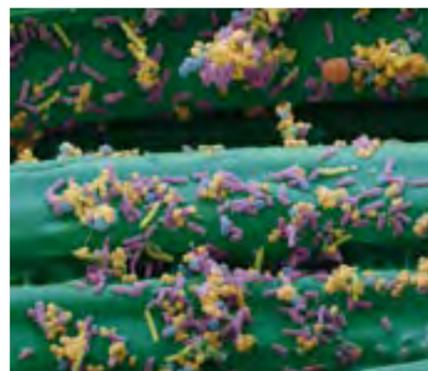

Anwendung

Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle unsauberen, kontaminierten oder infizierten Wunden:

- chronische Wunden, wie venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Dekubitalgeschwüre
- postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen

Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Saugkompressen				
7216101	9 cm x 7 cm	5	1/16	00658165
7216100	9 cm x 7 cm	40	1/2	00658171
7216201	10 cm x 10 cm	5	1/16	00660110
7216200	10 cm x 10 cm	40	1/2	00667879
7216300	20 cm x 10 cm	20	1/2	00667885
Kompressen				
7216401	6 cm x 4 cm	5	1/24	00667891
7216400	6 cm x 4 cm	40	1/6	00667916
7216501	9 cm x 7 cm	5	1/24	01418552
7216500	9 cm x 7 cm	40	1/6	01420833
Tamponaden				
7216600	50 cm x 2 cm	20	1/6	00673153
7216700	200 cm x 5 cm	10	1/6	00673176
Tupfer				
7216800	walnussgroß	70	1/6	00729965

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Cutimed® Sorbact® Gel

Infektionskontrolle und autolytisches Débridement.

Produkt

Die mit Hydrogel imprägnierte Wundauflage Cutimed® Sorbact® Gel reduziert die Keimzahl in der Wunde auf Basis des Sorbact®-Prinzips und sorgt gleichzeitig für ein feuchtes Wundmilieu. Cutimed® Sorbact® Gel reinigt die Wunde von Belägen und nekrotischem Gewebe und fördert die Wundheilung.

Cutimed® Sorbact® Gel bindet Mikroorganismen in kontaminierten, kolonisierten und infizierten Wunden, welche trocken oder schwach exsudieren. Das wirkstofffreie Cutimed®-Sorbact®-Prinzip nutzt die hydrophoben Eigenschaften von pathogenen Wundkeimen.

Diese werden durch die ebenfalls stark hydrophobe DACC-Beschichtung von Cutimed® Sorbact® irreversibel an den Verband gebunden, inaktiviert und sicher mit jedem Verbandwechsel entfernt.

Gleichzeitig unterstützt Cutimed® Sorbact® Gel das autolytische Débridement durch seine stark feuchtigkeitsspendende Wirkung. Nekrotisches Gewebe und Beläge werden durch das Hydrogel aufgeweicht und gewebeschonend abgetragen.

Cutimed® Sorbact® Gel besteht aus einer mit DACC (Dialkylcarbamoylechlorid) beschichteten und mit Hydrogel imprägnierten Acetatkomresse.



Anwendung

Cutimed® Sorbact® Gel Kompressen sind für jede Art von trockenen sowie schwach exsudierenden kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden unterschiedlicher Genese geeignet:

- chronische Wunden, wie venöse, arterielle und diabetische Ulzera sowie Dekubitalgeschwüre
- Wunden nach Exzision von Fisteln und kavitösen Abszessen
- postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- traumatische Wunden

Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Komresse mit Hydrogel imprägniert				
7261100	7,5 cm x 7,5 cm	10	1/36	02730346
7261101	15,0 cm x 7,5 cm	10	1/20	02730375