



## Gebrauchsanweisung Toilettensitzerhöhung

Vor Gebrauch des Hilfsmittels, bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.

**Unsere Toilettensitzerhöhungen sind in drei Höhen 7, 10 oder 13 cm erhältlich.  
Alle Größen gibt es mit und ohne Deckel.**

Produktbezeichnung	Artikel- Nr.	PZN
Toilettensitzerhöhung, 7 cm, mit Deckel	2014	3901844
Toilettensitzerhöhung, 7 cm, ohne Deckel	2013	3901838
Toilettensitzerhöhung, 10 cm, mit Deckel HIMI Nr. 33.40.01.0089	2023	4908618
Toilettensitzerhöhung, 10 cm, ohne Deckel HIMI Nr. 33.40.01.0090	2022	4908601
Toilettensitzerhöhung, 13 cm, mit Deckel HIMI Nr. 33.40.01.0091	2017	3901873
Toilettensitzerhöhung, 13 cm, ohne Deckel HIMI Nr. 33.40.01.0092	2016	3901867

Anwendungsgebiete / Indikationen / Kontraindikationen:

Die Toilettensitzerhöhung wird an das vorhandene WC- Becken montiert.

Eine Erhöhung des Toilettensitzes ist dann indiziert, wenn der Anwender eine eingeschränkte Fähigkeit des Hinsetzens und des Aufstehens hat.



Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zum Dauersitzen geeignet und für Patienten mit einem Körpergewicht über 135 kg kontraindiziert.

Aufbauanleitung:

Klappen Sie den Deckel und die Brille der Toilette hoch und stellen Sie die Toilettensitzerhöhung auf die Toilette. An den Toilettensitzerhöhungen befinden sich Halteklammern, die zur Fixierung an der Toilette dienen. Dazu müssen Sie die Schrauben leicht lösen. Setzen Sie nun die Erhöhung auf das Becken. Achten Sie darauf, dass die Halteklammern zum hinteren Toilettenrand weisen. Schieben Sie nun diese Erhöhung bis zum Anschlag leicht nach hinten. Schrauben Sie die Klammern fest, bis die Erhöhung fest auf der Toilette sitzt. Eine sichere Befestigung der Sitzerrhöhung ist nur im Zusammenhang mit handelsüblichen Toiletten gedacht.



Die Toilettensitzerhöhung darf nur im fest montierten Zustand verwendet werden. Falls sich die Toilettensitzerhöhung nicht sicher befestigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachhandel auf.

Reinigung und Desinfektion

Die Toilettensitzerhöhungen sind aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt, die mit allen haushaltsüblichen, milden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt werden können. Die Oberflächen sind glatt und können einfach mit einem Schwamm oder einem weichen, feuchten Tuch leicht gereinigt werden.

Technische Daten:

Sitzbreite:	350 mm	Gesamtbreite:	410 bis 450 mm
Sitztiefe:	390 mm	Gesamttiefe:	400 mm
Sitzerhöhung:	100 mm	Gewicht:	ca. 1100 bis 1500 g je nach Ausführung
Artikel-Nr.:		Material:	Polypropylen (PP)
2023, 2022		Lieferumfang:	1 Toilettensitzerhöhung 1 Gebrauchsanweisung
Sitzerhöhung:	130 mm		
Artikel-Nr.:			
2017, 2016			
<b>max. zul. Belastung:</b>	<b>135 kg</b>		



Die Toilettensitzerhöhung erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukterichtlinie)



Hersteller:

CareLiv Produkte OHG  
Str. d. Deutschen Einheit 8  
04643 Geithain  
Tel. +49(0)34341 - 40139  
Fax +49(0)34341 - 40189