

Wissenswertes über den China-Oel Inhalator:



Der China-Oel Inhalator dient zum Inhalieren von China-Oel. Durch das Inhalieren gelangt das China-Oel an die Nasen- und Mundschleimhäute sowie durch das tiefe Einatmen in die Atemwege und kann dort seine arzneiliche Wirkung entfalten.


Pflege und Reinigung des China-Oel Inhalators:

Nach Benutzung eines China-Oel Inhalators diesen äußerlich mit einem frischen Tuch abreiben und zweckmäßigerweise in der Original-Packung aufbewahren!

Mit dem China-Oel Inhalator unterwegs:

Der Vorteil des China-Oel Inhalators liegt darin, dass China-Oel jederzeit und überall, wie z.B. im Büro, Theater, Auto oder auf Reisen, benutzt werden kann. Der Inhalator ist einfach und unproblematisch zu handhaben und kann jeweils mit 2–3 Tropfen China-Oel nachgefüllt werden.

Gebrauchsanweisung des China-Oel Inhalators:

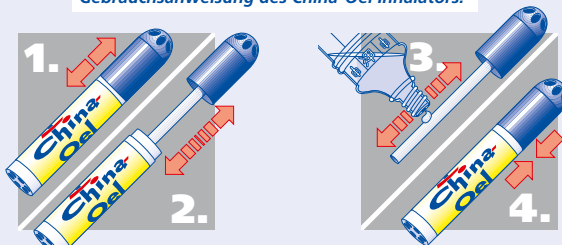


1. Zum Öffnen des China-Oel Inhalators blaues Kappenoberteil abziehen.
2. Kappenoberteil mit Aufnahme-Vlies ganz herausziehen.

3. 2–3 Tropfen China-Oel entlang des Vliesröhrchens verteilen.
4. Kappenoberteil mit Aufnahme-Vlies in das Inhalatorunterteil einführen und schließen.



5. Zur Behandlung des Nasenraums:
Blaue Seite wechselseitig in die Nasenlöcher einführen und kräftig durch die **Nase** einatmen.

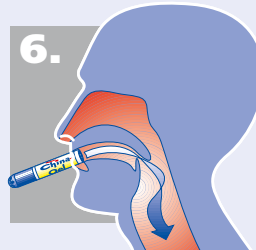

6. Zur Behandlung des Rachenraums:
Weißer Seite des Inhalators in den **Mund** nehmen und tief durchatmen.

Hinweis:

Den Inhalator nur höchstens 1 cm in die Nasenlöcher bzw. den Mund einführen. Auf keinen Fall verschlucken! Vor Kindern geschützt aufbewahren! Beim Auftröpfeln des China-Oels auf das Vliesröhrchen darauf achten, dass China-Oel nicht in die Augen gelangt!

Der Inhalator ist registriert als Deutsches Bundespatent unter der Nr. P 33 388.



Medizinprodukt gemäß
EWG-Richtlinie 93/42/EWG