

## Lactona Prothesenbox 3-teilig

PZN 10386271 | Art. 6606

- Lactona Prothesenbox 3-teilig
- Ideal zur Aufbewahrung und Reinigung von Prothesen und Zahnspangen
- Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kaffee, Wein und Nikotin



Die Lactona Prothesenbox 3-teilig, auch bekannt als Ecosym Dental Tray, wurde speziell entwickelt, um herausnehmbaren Zahnersatz und Zahnspangen wöchentlich effektiv zu reinigen. In Kombination mit dem Ecosym Week Forte Reinigungskonzentrat entfernt sie hartnäckige Ablagerungen wie Kaffee, Wein und Nikotin.

Dank ihres einfachen und benutzerfreundlichen Designs ist die Anwendung der Prothesenbox unkompliziert. Zahnärzte und Zahntechniker empfehlen die Verwendung des Ecosym Week Forte Reinigungssystems, was die Effektivität und Verlässlichkeit dieses Produkts unterstreicht.

Gebrauchsanweisung - Wöchentliche Anwendung:

1. Gießen Sie 3 bis 4 Kapseln Ecosym Forte in die Ecosym Dental Box.
2. Nehmen Sie die Prothese aus dem Mund und legen Sie sie auf das Gitter der Dentalbox.
3. Füllen Sie die Box mit lauwarmem Wasser, bis die Prothese vollständig untergetaucht ist.
4. Lassen Sie Ecosym Forte 8 Stunden lang einwirken.
5. Entnehmen Sie das Gitter aus der Dentalbox und spülen Sie die Prothese gründlich mit lauwarmem Wasser ab.

### **Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe**

Lactona, 3-teilig

### **Produktinformationen**

Abmessungen: 7,90 x 11,70 x 7,90 cm  
Artikelgewicht: 0,095 kg  
Gewicht mit Verpackung 0,10 kg  
Inhalt/Menge: 1 St  
UVP: 4,49 € inkl. MwSt

**Megadent**

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39  
40211 Düsseldorf  
www.megadent.de

info@megadent.de  
Tel +49 211 17754 0  
Fax +49 211 17754 20