

BE SURE Schwangerschaftstest

Einfach, schnell und zuverlässig: Für Sicherheit bereits ab dem ersten Tag der ausgefallenen Periode!

Bewährter Schwangerschaftstest, der bereits ab dem ersten Tag der ausbleibenden Regel verwendet werden kann. Er ist zu jeder Tages- und Nachtzeit verwendbar. Be Sure kann hCG im Urin bei einer Konzentration größer als oder gleich 25mIU/ml nachweisen.

99% Sicherheit bereits ab dem ersten Tag der ausbleibenden Regel

Klinischen Studien zufolge liegt die Zuverlässigkeit bei über 99%. Sie nehmen den Stab aus der Verpackung und entfernen die Kappe. Die Saugspitze sollte mindestens 10-15 Sekunden in den Urinstrahl gehalten werden. Der Test reagiert sehr schnell. Nach einer Minute erscheinen Linien auf dem Kontrollfeld. Sie können das Ergebnis nach ca. 3 Minuten ablesen.

Eine Linie bedeutet nicht schwanger, zwei Linien bedeutet ein positives Ergebnis, d.h. schwanger.

Eine Packung enthält:

- Mittelstrahltest mit monoklonalen Antikörpern
- Ausführliche Anleitung in deutscher, englischer, türkischer und arabischer Sprache

In-Vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung.

Sensitivität: 25 MIU HCG/ml Urin (entspricht >99% Sicherheit)