



system

AUGEN-TROPFEN

HYALURON 0,3%
+ ALOE VERA

Ohne
Konservierungsstoffe
Für empfindliche
Augen und Kontakt-
linsenträger geeignet

Indikation:

Doppelherz system AUGEN-TROPFEN HYALURON 0,3% + ALOE VERA ist eine konservierungsmittelfreie, sterile, die Gleitfähigkeit erhöhende, feuchtigkeitsspendende, beruhigende, schützende und erfrischende, isotonische, biokompatible, gepufferte Lösung zur Anwendung am Auge mit Hyaluronsäure 0,3 % und Aloe vera Gel. Empfohlen für empfindliche, trockene, dehydrierte, müde und gereizte Augen. Auch bei eingesetzten Kontaktlinsen geeignet, bei allen Kontaktlinsen anwendbar.

Der Verzicht auf Konservierungsmittel reduziert das Risiko von Nebenwirkungen und macht das Produkt auch für Behandlungen geeignet, die häufige und längere Anwendungen erfordern, wie z. B. bei nächtlichem Hornhautschutz.

Anwendungsgebiete:




- Zur Erhöhung der Gleitfähigkeit, Befeuchtung, Beruhigung sowie zum Schutz und zur Erfrischung empfindlicher, trockener, dehydrierter, müder und gereizter Augen;
- zur Ergänzung der Behandlung von Allergien und allergischer Bindehautentzündung;
- zur Linderung bei Juckreiz, Brennen, Fremdkörpergefühl und Reizung der Augen;
- ideal bei nicht-traumatischen/nicht-pathologischen Veränderungen des Tränenfilms;
- ideal bei umweltbedingter Belastung der Augen (übermäßige Sonneneinstrahlung, Wind, Staub, Klimaanlage, trockene und verschmutzte Luft usw.);
- ideal bei Überanstrengung der Augen (langes Arbeiten am Bildschirm, ungünstige Lichtverhältnisse, Nachtfahrten usw.);
- angezeigt bei längerem Tragen von Kontaktlinsen;
- auch während des Tragens von Kontaktlinsen geeignet;
- zusammen mit homöopathischen Behandlungen anwendbar.

Anwendungshinweise:

Ein oder zwei Tropfen pro Auge ein- oder mehrmals täglich je nach Bedarf oder nach Anweisung Ihres Augenarztes in das Auge einträufeln.
Kontaktlinsenträger geben vor dem Einsetzen oder nach dem Entfernen 2-3 Tropfen auf die Kontaktlinse. Während des Tragens der Kontaktlinsen nach Bedarf wiederholen, auch mehrmals täglich.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften.

So wenden Sie Doppelherz system AUGEN-TROPFEN an:

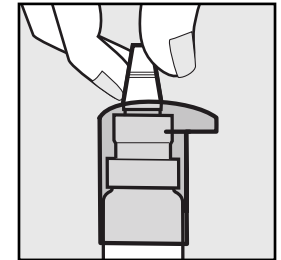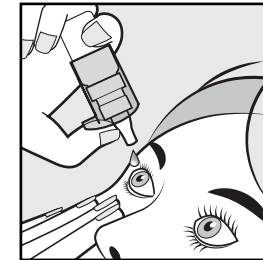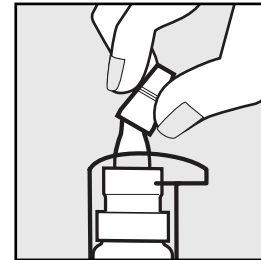

Warnhinweise:

- Bei Reizung der Augen die Anwendung des Produkts beenden und einen Augenarzt aufsuchen;
- nicht anwenden, wenn eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produkts besteht;
- von Wärmequellen fernhalten, an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C lagern;
- außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren;
- nicht schlucken;
- das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden;
- innerhalb von 180 Tagen nach dem ersten Öffnen verbrauchen;
- das Produkt nicht anwenden, wenn die Flasche beschädigt zu sein scheint;
- Auge oder Augenlid nicht mit der Spitze der Flasche berühren;
- Flasche nach jeder Anwendung fest verschließen;
- das Produkt mindestens 5 Minuten vor oder nach der Verabreichung anderer örtlich angewendeter Augenpräparate verwenden.

Zusammensetzung:

Hyaluronsäure 0,3 %, Aloe vera Gel, Dinatriumedetat, isotonische, auf einen pH Wert von 7,2 gepufferte Lösung

Nicht enthalten:

Konservierungsmittel, Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Parabene, Phenoxyethanol, Thiomersal und Bestandteile tierischen Ursprungs.

10 ml

Hersteller:

Omisan farmaceutici
via G. Galilei - Guidonia M. (RM) Italy



Vertrieb und Information:

Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de

