



**BD™ ThinWall -
mehr Innendurch-
messer für leichtere
Injektionen**

BD™ ThinWall

Bestellinformation

Produkt	Packungsgröße	PZN
 BD™ ThinWall 0,23 mm (32G) x 4 mm	100 Stück	16603723
 BD™ ThinWall 0,25 mm (31G) x 5 mm	100 Stück	16605308
 BD™ ThinWall 0,25 mm (31G) x 8 mm	100 Stück	16605449

Stand: Mai 2020

Bezugsquelle www.eu-medical.de

**Erhältlich mit Rezept oder im Freiverkauf
in jeder Apotheke und dem Diabetesfachhandel**

BD™: Alle Rechte vorbehalten. BD, das BD Logo und alle anderen
Marken sind – sofern nicht anders angegeben – Eigentum der Becton,
Dickinson und Company.

**Auf Wunsch mit
Abwurfbox gegen
unbeabsichtigte
Stichverletzungen**





Durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik ist eine sichere Insulininjektion gewährleistet.

Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Kinder und Jugendliche	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* mm
senkrecht, mit Hautfalte	5 mm
schräg, mit Hautfalte	8 mm
Erwachsene	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* + 5* mm
senkrecht, mit Hautfalte	8 mm
schräg, ohne Hautfalte	8 mm

* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

Passen auf alle gängigen Insulinpens:

BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 3

BerliPen Precision

BerliPen Junior



HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio

HumaPen Luxura HD



NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 5

NovoPen Echo



AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



INSULINPENS von sanofi-aventis

ClikStar

TactiPen

JuniorSTAR



AutoPen classic; BerliPen areo und areo 2, BerliPen 301 und 302; DiaPen; HumaPen Memoir und Luxura; NovoPen 4 und NovoPen Junior; OptiPen Pro 1 und 2; Pendiq; YpsoPen und auf alle Fertipens.

Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte

Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.