




# FUTURO™ KNIE-BANDAGE MIT SEITLICHER UNTERSTÜTZUNG

46163DABI, 46164DABI, 46165DABI



MITTLERER  
STÜTZGRAD

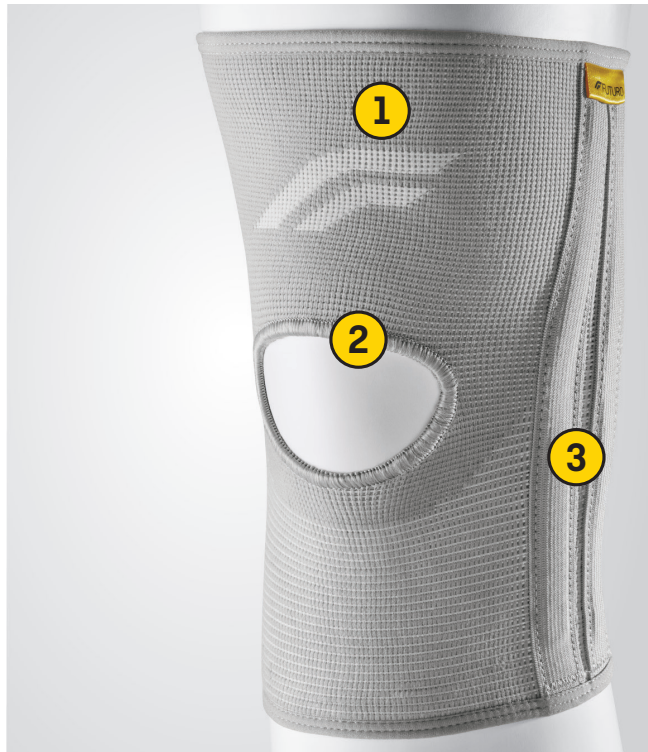

ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL

Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

Zusammensetzung: Metall, Nylon, Polyester, Elasthan, Baumwolle, Polyurethan.  
Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.  
3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

Sorgt für sofortige Kompression und laterale Stabilisierung.

## IDEAL FÜR:

Unterstützung bei den am häufigsten auftretenden Verletzungen wie Verstauchungen, Überbelastung, allgemeine Unterstützung

## EIGENSCHAFTEN:

- ① Elastisches Material verhindert Verrutschen.
- ② Patellaöffnung zur Unterstützung der Kniescheibe.
- ③ Beidseitig tragbare Stabilisatoren bieten zusätzliche Stabilität, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
- Anatomisch geformt für stabilen Halt.

## GRÖSSE:

Artikelnummer	Größe	PZN	CM
46163DABI	S	07632074	30.5-36.8
46164DABI	M	07632080	36.8-43.2
46165DABI	L	07632097	43.2-49.5



## TRAGEANWEISUNG:



Ziehen Sie die Bandage über den Fuß.



Ziehen Sie die Bandage nach oben über das Knie.



Achten Sie darauf, dass die Patellaöffnung über der Kniescheibe sitzt.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
www.futuro.de

