

## Pillenausdrücker

PZN 10962964 | Art. 6281

- Einfache Handhabung
- Effizientes Entnehmen von Tabletten aus Blisterverpackungen
- Auffangvorrichtung für mehrere Tabletten
- Leicht und kompakt



Der weiße Pillenausdrücker ist ein praktisches Hilfsmittel zum einfachen Entnehmen von Tabletten aus Blisterverpackungen.

### Gebrauchsanweisung:

1. Halten Sie den Pillenausdrücker in einer Hand, sodass der bewegliche Teil nach oben zeigt und Ihr Daumen auf der geriffelten Stelle des Stempels liegt.
2. Positionieren Sie die Blisterverpackung zwischen dem beweglichen Stempel und der Ausdrück-Öffnung, wobei die Tabletten nach oben und die Blister-Deckfolie nach unten zeigen.
3. Drücken Sie den beweglichen Teil nach unten, sodass die Tablette durch die Ausdrücköffnung in die Auffangvorrichtung des unteren Teils fällt.
4. Halten Sie den Ausdrücker mit der geöffneten Seite nach oben, sodass Sie mehrere Tabletten im unteren Teil sammeln können. Zum Schluss neigen Sie die Öffnung langsam nach unten, um die Tabletten aus dem unteren Lager zu befördern.

**Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe**  
Weiß, Megadent

**Produktinformationen**  
Abmessungen: 2,50 x 4,00 x 13,00 cm  
Artikelgewicht: 0,023 kg  
Gewicht mit Verpackung 0,03 kg  
Inhalt/Menge: 1 St  
UVP: 11,69 € inkl. MwSt

**Megadent**

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de  
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0  
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20

