

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



Mepiform®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY



USA 1-800-882-4582



Canada 1-800-494-5134



MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Mölnlycke Health Care AB (Publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011

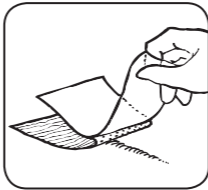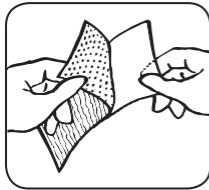

Produktbeschreibung

Mepiform ist ein dünner, flexibler Verband, welcher aus einem Laminat (Polyurethanfolie und Vliesstoff) besteht, das mit einem weichen Silikon gel beschichtet ist.

Safetac Technology

Safetac ist eine patentierte Silikon-Hafttechnologie. Verbände mit Safetac haften sanft und sicher. Hautschädigungen sowie Schmerzen werden beim Verbandwechsel vermieden.

Anwendungsgebiete

Mepiform kann zur Behandlung von alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden eingesetzt werden. Außerdem kann es vorbeugend zur Prävention von hypertrophen Narben und Keloiden eingesetzt werden.

AnwendungshinweiseApplikation

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.
2. Falls notwendig schneiden Sie den Verband auf die gewünschte Größe zu, so dass mindestens 1 cm der gesunden, wundumgebenden Haut bedeckt werden kann.
3. Stellen Sie sicher, dass die Applikationsfläche trocken ist, Wenn Sie eine Creme oder Salbe benutzen, achten Sie darauf, dass die Kontaktfläche mit der trockenen, salben-/cremefreien Haut genügend groß ist.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie und applizieren Sie Mepiform auf die Narbe/Wunde. Vermeiden Sie eine Dehnung des Verbandes, wenn Sie ihn über Gelenke applizieren.

1. Mepiform sollte möglichst 24 Stunden am Tag getragen werden. Bei Bedarf können Sie Mepiform zur Kontrolle und zwecks Hautreinigung kurzfristig entfernen und denselben Verband danach erneut verwenden.
2. Mepiform sollte gewöhnlich nach 7 Tagen oder wenn die Haftkraft nicht mehr ausreicht gewechselt werden.
3. Der Verband ist wasserfest und eignet sich zum Baden und Duschen.

Hinweis

Sollte Mazeration oder ein Hautausschlag auftreten, stellen Sie die Behandlung mit Mepiform ein, bis die Symptome verschwunden sind. Beginnen Sie erneut mit der Behandlung unter schrittweiser Erhöhung der Therapiedauer. Sollten die Symptome nicht verschwinden, beenden Sie die Behandlung und ziehen Sie einen Arzt zur Beurteilung hinzu.

Mepiform und Safetac sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB.

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



Issued 2009-02
40358-04

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011