

PRODUKTINFORMATION

ARTIKEL

Sea-Band Mama

Akupressurband für Schwangere

PRODUKTDDETAILS

SEA-BAND® MAMA

Akupressur-Band für Schwangere

Natürliche Hilfe gegen Schwangerschaftsübelkeit.

Kein Medikament – keine Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit Medikamenten.

Ab einem Handgelenkumfang von 14 cm geeignet.

Traditionelle Methoden und ihre Nachteile

Viele Frauen greifen zu Medikamenten, um die Symptome der Schwangerschaftsübelkeit zu lindern. Diese Medikamente können jedoch unerwünschte Nebenwirkungen haben:

- Antiemetika: Diese Medikamente gegen Übelkeit können Schläfrigkeit, Mundtrockenheit und in einigen Fällen sogar paradoxe Übelkeit verursachen.
- Hausmittel: Ingwertee und trockene Kekse können helfen, aber sie bieten oft nur kurzfristige Linderung und sind nicht immer praktisch.

Die medikamentenfreie Alternative: **Sea-Band**

Sea-Band bietet eine effektive und natürliche Lösung zur Linderung von Schwangerschaftsübelkeit, ganz ohne Medikamente und deren Nebenwirkungen. Die Akupressurbänder nutzen die Technik der Akupressur, um Symptome der Übelkeit zu lindern, indem sie gezielten Druck auf bestimmte Punkte am Handgelenk ausüben.

Wie funktioniert Sea-Band?

Sea-Band Akupressurbänder üben sanften Druck auf den Nei-Kuan-Punkt (P6) am Handgelenk aus. Dieser Punkt, der sich auf der Innenseite des Handgelenks zwischen den Sehnen befindet, ist bekannt dafür, Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Durch den kontinuierlichen Druck auf diesen Akupressurpunkt können die Symptome der Schwangerschaftsübelkeit erheblich gemildert werden.

ANWENDUNG

Die Anwendung von Sea-Band ist denkbar einfach. Ziehe das Band an, so dass der weiße Kunststoffknopf nach unten auf den Nei-Kuan-Punkt drückt. Der Punkt befindet sich etwa drei Fingerbreit unterhalb der Handgelenksfalte zwischen den beiden Sehnen. **Trage das Band an beiden Handgelenken für optimale Ergebnisse.**

PACKUNGSGRÖSSEN

PZN	Artikel	Inhalt	Netto-Gewicht
0723164	Sea-Band MAMA Akupressurband für Schwangere	2 Bänder	