




Long COVID Test

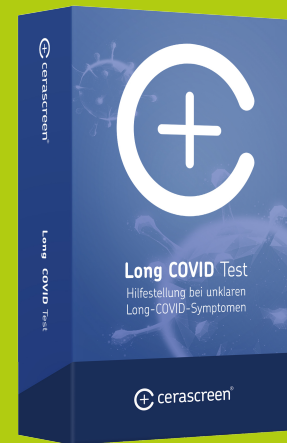

Hilfestellung bei unklaren Long-COVID-Symptomen

Der cerascreen® Long COVID Test ist ein Probenahme- und Einsende-Testkit für zuhause, mit dem Sie den Morgen- und Abendwert des Cortisols und den Blutspiegel von Immunzellen bestimmen. Medizinische Fachlabore analysieren Ihre Proben. Zusätzlich füllen Sie einen wissenschaftlich validierten Fragebogen aus. Alle Ergebnisse zusammen unterstützen Sie dabei, die Wahrscheinlichkeit einer Long-COVID-Erkrankung zu bestimmen.

- + zuhause Speichelprobe + Blutprobe entnehmen – einfach und bequem
- + professionelle Analyse in medizinischen Fachlaboren
- + Ergebnis innerhalb von 1-2 Wochen nach Probeneingang
- + ausführlicher Ergebnisbericht, den Sie auch mit Ärzt*innen und Krankenversicherungen besprechen können

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze und zwei Speichelproben brauchen. Anschließend schicken Sie die Proben im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Long COVID Test

Der Long Covid Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Long Covid Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Long Covid Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Long Covid Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu da, Krankheiten zu diagnostizieren. Nur Ärzt*innen dürfen endgültige Diagnosen stellen, der Test ist dazu nicht geeignet. Er liefert aber Laborwerte, die Ihnen in Gesprächen mit Ärzt*innen und Krankenversicherungen als Anhaltspunkt dienen können.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Long Covid Test:
<https://www.cerascreen.de/products/long-covid-test>



PZN 19297304

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

