

belladot[®]

NEUHEIT! Willkommen Evelina!

Die neue Menstruationskappe für jede Frau!

Menstruationskappe EVELINA von Belladot ist die Zukunft in der Monatshygiene. Sie ist die **benutzerfreundliche, hygienische, sichere und wiederverwendbare Alternative zu Binden und Tampons.**



Eigenschaften & Vorteile:

- **KEINE** Beeinflussung der pH-Balance
- trocknet **NICHT** die Schleimhäute der Scheide aus
- **hygienisch**, da 100% Silikon
- **flexibel einsetzbar** → auch anwendbar bei allen Aktivitäten (Baden, Schwimmen, Sauna, Sport etc.)
- **günstig** und umweltfreundlich (mehrere Jahre anwendbar)
- **einfach im Gebrauch** → nur 2-4 Mal am Tag entleeren & auch über Nacht verwendbar

In 2 Größen über jede Apotheke erhältlich:

Size 1 (S-M) → PZN 11110542

Size 2 (M-L) → PZN 11110559

belladot[®]



Die EVELINA MENSTRUATIONSKAPPE eignet sich für Frauen in jedem Alter und ist:

- **hypoallergen, latexfrei, parfümfrei und sicher.**
- **günstig und umweltfreundlich.**
- **eine hygienische und gesunde Alternative zu Wegwerf-Tampons und Binden.**

Bereits über 20% der schwedischen Frauen nutzen mittlerweile Menstruationskappen, Tendenz steigend. Jetzt kommt EVELINA endlich nach Deutschland!

belladot®



Gebrauch der Menstruationskappe EVELINA von BELLADOT

Vor Gebrauch die Menstruationskappe EVELINA reinigen

Menstruationskappe durch Auskochen in reichlich Wasser (ca. 3 - 5 Min.) desinfizieren. Vor Gebrauch von EVELINA die Hände sorgfältig mit warmem Wasser und Seife waschen. Das Einführen von EVELINA kann erleichtert werden, indem die Kappe zuerst mit Wasser befeuchtet oder ein wasserlösliches Gleitmittel benutzt wird.

FALTEN

Presse die Menstruationskappe zusammen und falte sie noch einmal zur Mitte, so dass der obere Rand der Kappe ein "C" bildet.



1.



2.

EINFÜHREN

Führe die gefaltete Kappe mit dem Rand voran in die Scheide ein. EVELINA Menstruationskappe kann im Sitzen, Stehen oder in der Hocke eingeführt werden; eine leichte Grätschstellung erleichtert das Einführen.



3.



4.

HERAUSNEHMEN

Vor dem Herausnehmen die Hände waschen. Falls der untere Teil der Kappe nicht sofort zu erreichen ist, einfach die Kappe vorsichtig am Stiel herausziehen. Dabei kann man mithelfen, indem man versucht, die Kappe leicht herauszupressen. Beim Herausziehen den Boden der Kappe leicht zusammendrücken, um den Unterdruck zu lösen.

ENTLEEREN und AUSWASCHEN

EVELINA entleeren und danach sorgfältig mit kaltem Wasser und milder, unparfümierter Seife auswaschen. Für unterwegs kann man unparfümierte Reinigungstücher benutzen.

AUFBEWAHRUNG nach der Periode

Nach der Periode kann EVELINA in kochendem Wasser sterilisiert oder mit Reinigungstüchern desinfiziert werden. Die Menstruationskappe sollte NICHT in einer luftdichten Dose oder Plastiktüte aufbewahrt werden.

Weitere Infos unter: <http://www.menstruations-kappe.de>

*Menstruationskappe EVELINA von Belladot ist die Zukunft in der Monatshygiene. Sie ist die **benutzerfreundliche, hygienische, sichere und wiederverwendbare Alternative zu Binden und Tampons.***